



## Quadrant FiniSense

### Composizione

- 1000 mg Quadrant FiniSense contengono:
- 361 mg di 2-idrossietilmetacrilato (HEMA)
  - 51 mg glutaraldeide
  - acqua distillata deionizzata

### Validità

36 mesi

### Indicazioni

Quadrant FiniSense viene utilizzato per il trattamento della dentina sensibile. Il meccanismo di azione è basato sulla precipitazione delle proteine del plasma, che diminuisce la permeabilità dentinale occludendo i tubuli dentinali periferici, e ostacolando il flusso dei liquidi.

Quadrant FiniSense viene utilizzato per:

- eliminare il dolore al colletto scoperto quando il restauro non ne è necessario.
- prevenire e ridurre il dolore post-operatorio a seguito delle preparazioni per restauri diretti o indiretti.

### Dosaggio e applicazione

#### Trattamento della sensibilità dentinale

Il trattamento della dentina sensibile è indicato in caso di forte reazione a stimoli termici, chimici e meccanici. Se la sensibilità dentinale è moderata, si consigliano terapie alternative, quali l'uso di un dentifricio desensibilizzante.

- Pulire la dentina (ad es. con della pomice) eventualmente sotto anestesia locale, e sciacquare con acqua <sup>[1]</sup>.
- Proteggere gengiva e mucosa con la diga di gomma. Assicurarsi che Quadrant FiniSense venga a contatto solo con la zona da trattare <sup>[2]</sup>.
- Applicare la **quantità minore possibile** di Quadrant FiniSense con una Q-Brush e lasciare agire per 30-60 sec <sup>[3]</sup>.
- Successivamente asciugare con cura la superficie con un delicato getto d'aria finché il liquido non sarà sparito e la superficie diventata opaca <sup>[4]</sup>. Risciacquare sotto aspirazione <sup>[5]</sup>.
- Le cavità profonde e/o i punti vicini alla polpa devono essere protetti con un liner prima dell'applicazione di Quadrant FiniSense.

In caso di insuccesso consigliamo di ripetere il trattamento o nella stessa seduta o in una successiva prima di pensare ad una soluzione alternativa. Se anche questo non dovesse risolvere il problema, valutare la necessità di applicare un adesivo dentinale eventualmente coperto da uno strato di composito.

#### Trattamento della dentina a seguito di preparazione protesica

- Proteggere gengiva e mucosa con la diga di gomma.
- Con il getto d'aria asciugare l'umidità della dentina preparata.
- Applicare la **quantità minore possibile** di Quadrant FiniSense sulla zona da trattare con una Q-Brush e lasciare agire per 30-60 sec.
- Asciugare con cura la dentina con il getto d'aria, sciacquare con acqua utilizzando l'aspiratore.
- Le preparazioni profonde e/o i punti vicini alla polpa devono essere protetti con un liner prima dell'applicazione di Quadrant FiniSense.

### Avvertenze e precauzioni

Quadrant FiniSense può essere usato soltanto da un dentista.

Non utilizzare Quadrant FiniSense dopo la scadenza (vedi etichetta).

Non conservare a temperature superiori a 25 °C.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Quadrant FiniSense contiene il 36% di metacrilato (diossietilico) (HEMA) e 5% glutaraldeide.

- **Provoca irritazioni locali ed ha effetti tossici**
- **Può provocare irritazioni ed ustioni agli occhi, all'apparato respiratorio, alla pelle e alle mucose.**
- **È necessario prendere sempre le dovute precauzioni prima di applicare Quadrant FiniSense.**
- **Dosare la quantità minore possibile necessaria per il trattamento.**
- **Evitare il contatto con occhi, pelle e mucose.**
- **In caso di emergenza sciacquare immediatamente con abbondante acqua utilizzando anche l'aspiratore.**

### Controindicazioni

Non utilizzare Quadrant FiniSense:

- se non si possono osservare le dovute precauzioni e non può essere utilizzata la tecnica di applicazione descritta
- se il paziente è allergico ai componenti di Quadrant FiniSense
- se il dolore è causato da una infiammazione pulpale
- in presenza di polpa scoperta

### Effetti collaterali

La polpa può presentare irritazione in cavità molto profonde se non adeguatamente protetta. Perciò le pareti della cavità situate molto vicino alla polpa devono essere coperte con un liner.

### Interazioni

Non si conoscono interazioni con altri prodotti.

### Prodotto in Germania

Il prodotto può essere utilizzato solo dai dentisti.

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.