



## Quadrant FiniSense

### Samenstelling

- 1000 mg Quadrant FiniSense bevat:
- 361 mg (2-hydroxyethyl)methacrylaat
  - 51 mg glutaaraldehyde
  - gezuiverd water

### Houdbaarheid

36 maanden

### Indicaties

Quadrant FiniSense wordt gebruikt voor de behandeling van zeer gevoelig dentine. De werking berust op de precipitatie van plasma-eiwitten, waardoor de permeabiliteit van het dentine vermindert en de perifere dentine tubuli worden geblokkeerd. Dit verhindert de vloeistofstroom door de tubuli die de oorzaak is van de gevoeligheid.

Quadrant FiniSense wordt gebruikt:

- voor het elimineren van pijn ter plaatse van blootliggende tandhalzen indien een restauratie niet noodzakelijk is
- voor het voorkomen en verlichten van post-operatieve pijn als gevolg van prepareren van elementen voor een directe of indirecte restauratie

### Doseren en toepassen

#### Behandeling van zeer gevoelig dentine

De behandeling van zeer gevoelig dentine is uitsluitend geïndiceerd in geval van een hevige pijnreactie na toedienen van thermische, osmotische of tactiele stimuli. Indien er sprake is van een milde reactie zijn alternatieve therapieën, zoals het gebruik van een desensitiserende tandpasta geïndiceerd.

- Reinig het dentine (b.v. met puimsteen), eventueel onder lokale anesthesie, en spoel af met water [1].
- Bescherm gingiva en mucosa door gebruik van rubber dam. Zorg ervoor dat Quadrant FiniSense uitsluitend in contact kan komen met het te behandelen gebied [2].
- Breng de voor het te behandelen oppervlak **kleinst mogelijke hoeveelheid** Quadrant FiniSense aan met een Q-Brush en laat het gedurende 30-60 sec inwerken [3].
- Droog vervolgens voorzichtig het oppervlak met de luchtspuit tot de vloeistoffilm is verdwenen en het oppervlak niet langer glanst [4]. Houd tijdens het blazen de afzuiger in de nabijheid van het element. Daarna goed met water spoelen [5].
- Diepe caviteiten en/of locaties dicht bij de pulpa dienen met een adequate liner te worden beschermd alvorens Quadrant FiniSense wordt toegepast.

Indien een enkelvoudige toepassing van Quadrant FiniSense niet voldoende verlichting van de pijn brengt, kan de behandeling worden herhaald tijdens dezelfde of een volgende zitting.

Indien ook dit geen verlichting biedt, kan overwogen worden een bondingprocedure voor composiet toe te passen, eventueel gevolgd door het aanbrengen van composiet.

#### Behandeling van het dentine na een kroonpreparatie

- Bescherm gingiva en mucosa met behulp van rubber dam.
- Verwijder vocht van het geprepareerde dentine met de luchtspuit.
- Breng de voor het te behandelen oppervlak **kleinst mogelijke hoeveelheid** Quadrant FiniSense aan met een Q-Brush en laat het gedurende 30-60 sec. inwerken.
- Droog het dentine voorzichtig met de luchtspuit, spoel vervolgens met water en gebruik daarbij de afzuiger.
- Diepe caviteiten en/of locaties dicht bij de pulpa dienen met een liner te worden beschermd alvorens Quadrant FiniSense wordt toegepast.

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Quadrant FiniSense mag uitsluitend in de tandartspraktijk gebruikt worden.

Quadrant FiniSense niet na de houdbaarheidsdatum gebruiken (zie etiket).

Niet bewaren boven de 25 °C.

Buiten bereik van kinderen houden.

Quadrant FiniSense bevat 36% (2-hydroxyethyl)methacrylaat (HEMA) en 5% glutaaraldehyde.

- **Het is plaatselijk irriterend en geeft toxische effecten.**
- **Damp van en contact met Quadrant FiniSense kan irritatie en brandwonden veroorzaken aan ogen, ademhalingsorganen, huid en slijmvliezen.**
- **Er dienen altijd passende voorzorgsmaatregelen genomen te worden voordat Quadrant FiniSense wordt toegepast.**
- **Doseer de kleinst mogelijke hoeveelheid benodigd voor de behandeling.**
- **Voorkom contact met ogen, huid en slijmvliezen.**
- **In noodgevallen onmiddellijk spoelen met veel water en de afzuiger gebruiken.**

### Contra-indicaties

Quadrant FiniSense niet gebruiken

- wanneer de voorzorgsmaatregelen niet genomen kunnen worden of de beschreven techniek van aanbrengen niet toegepast kan worden
- wanneer de patiënt allergisch is voor een bestanddeel van Quadrant FiniSense
- wanneer de pijn veroorzaakt wordt door pulpitis
- wanneer er sprake is van een pulpa-exponatie

### Bijwerkingen

Irritatie van de pulpa kan worden waargenomen in zeer diepe caviteiten zonder adequate bescherming van de pulpa.

Derhalve dienen de gedeelten van de caviteit die zeer dicht bij de pulpa zijn gelokaliseerd, afgedekt te worden met een liner.

### Interacties

Er zijn geen interacties met andere middelen bekend.

### Geproduceerd in Duitsland

Uitsluitend voor tandheelkundige doeleinden bestemd.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

# CAVEX