

Quadrant Total Etch

Beschreibung

Quadrant Total Etch ist ein Gel mit 20%iger Phosphorsäure für die Total-Etch-Technik.

Zusammensetzung

Quadrant Total Etch enthält

- 20%ige Phosphorsäure

Indikation

- Konditionierung von Schmelz und Dentin nach der Total-Etch-Technik.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Unterlagen wie Kalziumhydroxid können sich je nach Zusammensetzung durch die Säure auflösen.

Nur säurebeständige Produkte verwenden und sicherstellen, dass diese vollständig ausgehärtet sind, bevor **Quadrant Total Etch** aufgetragen wird.

Anwendung

1. Präparation nach den allgemein gültigen Regeln für Kompositrestaurationen. Die Präparation anschließend reinigen und trocknen. Die Anwendung von Kofferdam wird empfohlen.
2. **Quadrant Total Etch** auf die Restaurierungsfläche von Schmelz und Dentin auftragen und 15 – 30 Sek. einwirken lassen (Total Etch).
3. **Quadrant Total Etch** mindestens 5 Sek. gründlich mit Wasser spülen und das überschüssige Wasser mit einem kurzen, weichen Luftstrom entfernen. Sicherstellen, dass kein Ätzmaterial auf der Präparation zurückbleibt. Falls eine Sichtkontrolle des Ätz-Effekts bei dem Schmelz gewünscht wird, ist eine intensivere Trocknung der Präparation erforderlich. Der Schmelz sieht dann bei ausreichender Ätzung kreidig weiß aus. Bei fluoridiertem Schmelz wird eine Wiederholung der Schritte 2 und 3 empfohlen.
4. Ein Bonding System (z.B. **Quadrant UniBond** oder **Quadrant Uni-1-Bond**) nach den Vorschriften des Herstellers applizieren.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen

- **Quadrant Total Etch** enthält 20%ige Phosphorsäure. Bei einem Kontakt mit den Augen oder der Haut kann es zu Reizungen kommen. In einem solchen Fall sofort mit viel Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt zu Rate ziehen. Um einer Sensibilisierung durch Hautkontakt vorzubeugen, ist eine Berührung der Haut zu vermeiden.

Lagerung

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Nicht über 25 °C lagern. Spritze nach Gebrauch immer sofort gut schließen. Von Kindern fernhalten.

Handelsform

Quadrant Total Etch: Spritze à 2,5 ml

Hergestellt in Deutschland.

Ausschliesslich für zahnärztliche Zwecke bestimmt.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten Ware beschränkt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen