

# Quadrant Total Etch

## Description

**Quadrant Total Etch** est un gel d'acide phosphorique à 20% pour la technique du mordançage total (total etch).

## Composition

**Quadrant Total Etch** contient

- 20% d'acide phosphorique

## Indications

- Conditionnement de l'émail et de la dentine selon la technique du mordançage total.

## Interactions avec d'autres agents

Des fonds de cavité tels que l'hydroxyde de calcium peuvent, selon leur composition, être dissouts par l'acide.

Utilisez des produits résistants aux acides et veillez à ce que ceux-ci soient entièrement durcis avant l'application du **Quadrant Total Etch**.

## Utilisation

1. Préparation selon les règles générales pour les restaurations en composite, ensuite nettoyer et sécher la préparation. L'utilisation d'une digue est conseillée.
2. Appliquer le **Quadrant Total Etch** sur l'émail et la dentine à restaurer et laisser agir durant 15 à 30 sec. (total etch).
3. Bien rincer le **Quadrant Total Etch** à l'eau durant 5 sec. au minimum et éliminer l'excès d'eau avec un jet d'air faible et de courte durée. Veillez à ce qu'il ne persiste plus d'agent de mordançage sur la préparation.  
Lorsqu'un contrôle visuel de l'effet du mordançage sur la préparation est souhaité, un séchage plus intensif de la préparation est nécessaire. La surface de l'émail présente un aspect blanc crayeux lorsque le mordançage est suffisant.  
Pour de l'émail fluorisé, il est recommandé de répéter les étapes 2 et 3.
4. Appliquer un système de bonding (p.ex. **Quadrant UniBond** ou **Quadrant Uni-1-Bond**) selon les recommandations du fabricant.

## Sécurité

- **Quadrant Total Etch** contient 20% d'acide phosphorique. Des irritations peuvent survenir lors du contact avec la peau ou avec les yeux. En cas de contact avec la peau ou avec les yeux, rincer immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter éventuellement un médecin. Pour éviter la sensibilisation par contact cutané, le contact avec la peau doit être évité.

## Conservation

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Ne pas conserver au-dessus de 25 °C. Toujours bien refermer la seringue immédiatement après l'utilisation. Garder hors de portée des enfants.

## Conditionnement

**Quadrant Total Etch**: seringue de 2,5 ml.

Produit en Allemagne

Exclusivement destiné à l'usage dentaire.

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédés et applications que vous envisagez.

L'utilisation, la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, des lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.