

Quadrant Total Etch

Descrizione

Quadrant Mordenzante Totale è un gel di acido fosforico al 20% adatto alla tecnica della mordenzatura smalto/dentinale.

Composizione

Quadrant Total Etch contiene

- Acido fosforico al 20%

Indicazioni

- Condizionare smalto e dentina secondo la tecnica della mordenzatura totale.

Interazioni con altri materiali

Sottofondi come l'idrossido di calcio potrebbero essere dissolti dall'acido, dipende dalla loro composizione. Usare materiali resistenti agli acidi e accertarsi che siano completamente induriti, prima di applicare **Quadrant Total Etch**.

Applicazione clinica

1. preparare la cavità secondo le tecniche per restauri in composito. Detergere e asciugare la cavità. L'uso della diga è consigliato.
2. Applicare **Quadrant Total Etch** gel contemporaneamente sullo smalto e sulla dentina da trattare e lasciare agire per 15-30 secondi (mordenzatura totale).
3. Sciacquare **Quadrant Total Etch** gel completamente per almeno 5 secondi e rimuovere l'umidità in eccesso asciugando con un leggero getto d'aria. Assicurarsi che non siano rimasti residui di mordenzante sulla preparazione. Per verificare se lo smalto è stato mordenzato, è necessario asciugare fino a disidratare la superficie. Lo smalto, dopo la mordenzatura, assume un aspetto gessoso. Nel caso si tratti di smalto trattato con fluoro, potrebbe essere necessario ripetere i passaggi 2 e 3.
4. Applicare il sistema adesivo (come **Quadrant UniBond** o **Quadrant-1-Bond**) seguendo le istruzioni del produttore.

Avvertenze

- **Quadrant Total Etch** contiene acido fosforico al 20%. Il contatto con occhi e cute potrebbe causare sensibilizzazione. In caso di contatto accidentale con cute o gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e se necessario consultare un medico. Per prevenire problemi di sensibilità cutanea evitare il contatto con la cute.

Conservazione

Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza indicata. Non conservare a temperature superiori ai 25 °C (77 °F).

Chiudere sempre la siringa dopo l'uso. Tenere fuori della portata dei bambini.

Confezione

Quadrant Total Etch: siringa da 2,5 ml.

Prodotto in Germania.

Il prodotto può essere utilizzato solo dai dentisti.

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.