

Quadrant Total Etch

Tanımlama

Quadrant Total Etch, total etch teknikle kullanım için üretilmiş %20'lik bir fosforik asit jelidir.

Bileşimi

Quadrant Total Etch,
▪ %20 fosforik asit içerir.

Endikasyonları

▪ Total Etch tekniğe göre mine ve dentin yüzeyinin hazırlanması (conditioning).

Diğer materyallerle etkileşimler

Kalsiyum hidroksit gibi taban astarlama materyalleri, bileşimlerine bağlı olarak asitle çözülebilirler. Sadece aside dayanıklı materyalleri kullanınız ve **Quadrant Total Etch** uygulamadan önce bunların tamamen sertleştiğinden emin olunuz.

Klinik İşlem

1. Kompozit restorasyonlar için kullanılan genel talimatlara göre kaviteyi hazırlayınız. Preparasyonu temizleyiniz ve kurutunuz. Rubber dam kullanılması önerilmektedir.
2. Restore edilecek mine ve dentin üzerine **Quadrant Total Etch** jel uygulayınız ve 15-30sn (total etch) yüzeyde bırakınız.
3. **Quadrant Total Etch** jeli, en az 5sn boyunca tamamen yıkayınız ve hafifçe hava sıkarak, preparasyon yüzeyinden fazla suyu uzaklaştırınız. Preparasyon yüzeyinde hiç asit kalmadığından emin olunuz. Minede asitlemenin yapıldığından görsel olarak emin olmak istiyorsanız, preparasyonun daha kuvvetli kurutulması gerekmektedir. Yeterli etchingleme yapılmışsa, mine yüzeyi buz-beyazı renk gösterecektir. Florozlu mine varsa, 2 ve 3 nolu adımları tekrarlamak gerekebilir.
4. Üreticinin talimatlarına göre bonding sistemini (örneğin **Quadrant Unibond ya da Quadrant Uni-1-Bond**) uygulayınız.

Güvenlik önerisi

▪ **Quadrant Total Etch**, %20'lik fosforik asit içerir. Gözle ve deriyle temas, hassasiyete neden olabilir. Deri ya da gözlerle kazayla temas durumunda, bu bölgeleri hemen bol miktarda suyla yıkayınız ve gerekiyorsa bir doktora danışınız. Hassasiyeti önlemek için deriyle temastan kaçınılmalıdır.

Saklama önerisi

Materyali, son kullanım tarihinden sonra kullanmayınız. 25 °C'den (77 °F) daha yüksek ısılarda saklamayınız. Kullandıktan sonra, şırıngayı daima sıkıca kapatınız. Çocukların erişebileceği yerden uzakta tutunuz.

Paketleme

Quadrant Total Etch: 2.5ml şırınga

Almanya'da üretilmiştir.

Sadece dental kullanım içindir.

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdiğimiz teknik tavsiyeler güvenle ancak garanti verilmenden yapılmıştır, ve bu aynı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği haklarını da kapsar. Bu sizi belirtilen prosesler ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünleri test etmek zorunluluğundan uzaklaştırmaz. Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve prosesleri bizim kontrolümüzün ötesindedir ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluğa rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malların değerleriyle limitli olacaktır. Tabii ki, ürünlerimizin uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarımızın içinde sağlayacağız.