



Οδηγίες Χρήσης

Quadrant Uni-1-Bond

Περιγραφή

Quadrant Uni-1-Bond είναι ένα συγκολλητικό μέσο ελαφριάς σκλήρυνσης, ενός συστατικού, γενικής χρήσης σε συνδυασμό με αποκαταστάσεις συγκολλητικού. Το **Quadrant Uni-1-Bond** δημιουργεί υπόστρωμα και συγκολλά στην ίδια φάση. Το **Quadrant Uni-1-Bond** αποτελεί μία σύνθεση αιθανολικής βάσης από συγκολλητικές ρητίνες ελαφριάς δραστηριότητας. Πριν από την εφαρμογή του **Quadrant Uni-1-Bond** η οδοντική δομή καθαρίζεται με **Quadrant Total Etch**.

Σύνθεση

Το **Quadrant Total Etch** περιέχει

- 20 τοις εκατό φωσφορικό οξύ

Το **Quadrant Uni-1-Bond** περιέχει

- Ακρυλικό μεθύλιο
- Αιθανόλη
- Φωτοενεργοποιητές

Ενδείξεις

- Συγκόλληση συνθετικού πληρωτικού υλικού σε αδαμαντίνη και οδοντίνη.
- Σφράγιση υπερευαίσθητων περιοχών των δοντιών.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα υλικά

Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μέσα αποκατάστασης που περιέχουν ευγενόλη, καθώς αυτά επιδρούν δυσμενώς στον πολυμερισμό.

Κλινική διαδικασία

1. Προετοιμάστε την κοιλότητα σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες αποκατάστασης με συνθετικές ουσίες. Καθαρίστε και στεγνώστε την προετοιμασία. Συνιστάται η χρήση λαστιχένιου φράγματος. Κατά την αποκατάσταση εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών, η προετοιμασία ενδέχεται να μην είναι απαραίτητη.
2. Απλώστε πηγμα **Quadrant Total Etch** επάνω στην προς αποκατάσταση αδαμαντίνη και οδοντίνη και αφήστε το για 15-30 δευτερόλεπτα.
3. Ξεπλύνετε καλά το πηγμα **Quadrant Total Etch** για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα και απομακρύνετε την περίσσεια υγρασίας από την προετοιμασία με ένα ελαφρό ρεύμα αέρα. Το βέλτιστο συγκολλητικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν το **Quadrant Uni-1-Bond** απλώνεται σε υγρή και στιλπνή οδοντίνη. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε οπτικά ότι έχει πραγματοποιηθεί η διαμόρφωση της αδαμαντίνης, απαραίτητη είναι η εντονότερη ξήρανση της κοιλότητας. Η επιφάνεια της αδαμαντίνης θα πάρει ένα γαλακτερό λευκό χρώμα όταν θα έχει διαμορφωθεί επαρκώς. Εάν συμβαίνει αυτό, ολόκληρη η προετοιμασμένη επιφάνεια θα πρέπει να υγρανθεί ξανά με νερό (π.χ. με ένα υγρό μπαλάκι) πριν από την εφαρμογή του **Quadrant Uni-1-Bond**.
4. Απλώστε **Quadrant Uni-1-Bond** αμέσως μετά την αφαίρεση της περίσσειας νερού.
5. Εμποτίστε το άκρο του απλικατέρ ή μαλακή βούρτσα μίας χρήσης με **Quadrant Uni-1-Bond** και τοποθετήστε άφθονη ποσότητα σε ολόκληρη την επιφάνεια της κοιλότητας.
6. Απλώστε δύο επιπλέον στρώσεις **Quadrant Uni-1-Bond** και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα .
7. Απλώστε ελαφρά **Quadrant Uni-1-Bond** με ένα ελαφρό ρεύμα αέρα για να εξατμιστεί το διαλυτικό και η περίσσεια υγρασίας (περίπου 2-5 δευτερόλεπτα).
8. Εάν η επιφάνεια της κοιλότητας δεν είναι ομοιόμορφα στιλπνή μετά από το βήμα αυτό, απλώστε και άλλες στρώσεις **Quadrant Uni-1-Bond** όπως περιγράφεται παραπάνω.
9. Σκληρύνετε ελαφρά **Quadrant Uni-1-Bond** για 20 δευτερόλεπτα με μία στάνταρ μονάδα ελαφράς σκλήρυνσης.
10. Τοποθετήστε υλικό αποκατάστασης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Υποδείξεις ασφαλείας

- Το **Quadrant Total Etch** περιέχει 20 τοις εκατό φωσφορικό οξύ. Το **Quadrant Uni-1-Bond** περιέχει ακρυλικό μεθύλιο. Η επαφή με τα μάτια και το δέρμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Σε περίπτωση συμπτωματικής επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεβγάλτε αμέσως με άφθονο νερό και επικοινωνήστε με ιατρό εάν χρειάζεται. Για να αποφευχθεί ο ερεθισμός, η επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται.
- Το **Quadrant Uni-1-Bond** περιέχει αιθανόλη, η οποία είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη. Φροντίστε το Quadrant Uni-1-Bond να παραμένει μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις.

Υπόδειξη για την φύλαξη

Συνιστάται η φύλαξη στο ψυγείο. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό μετά την ημερομηνία λήξης. Αποφύγετε τη φύλαξη σε απευθείας έκθεση στο φως του ηλίου. Πάντα να κλείνετε καλά το δοχείο για να αποφεύγεται η εξάτμιση του περιεχομένου. Φροντίστε να βρίσκεται μακριά από τα παιδιά.

Κατασκευάζεται στη Γερμανία.

Μόνο για οδοντιατρική χρήση.

Συσκευασία

Quadrant Uni-1-Bond: φιάλη 4 ml ελαφρά σκληρυμένου, συγκολλητικού μέσου ενός συστατικού.

Quadrant Total Etch: σύριγγα των 2.5 ml.

Οι τεχνικές μας συμβουλές, είτε προφορικές, γραπτές είτε μέσω πειραμάτων, παρέχονται καλή τη πίστη χωρίς ωστόσο εγγύηση, και αυτό ισχύει επίσης για τα αποκλειστικά δικαιώματα τρίτων. Δεν αναιρούν την υποχρέωσή σας για δοκιμή των προϊόντων τα οποία προμηθεύεστε από εμάς, σε ό, τι αφορά την καταλληλότητα τους για τις διαδικασίες και χρήσεις για τις οποίες προορίζονται. Η εφαρμογή, χρήση και επεξεργασία των προϊόντων είναι πέραν της δικής μας δικαιοδοσίας, και κατά συνέπεια αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Εάν παρόλη την ευθύνη αυτή διαπιστωθεί υπαιτιότητα για τυχόν βλάβη, αυτή περιορίζεται μέχρι ποσού ίσου με την αξία των προϊόντων τα οποία προμηθευτήκατε από εμάς, και τα οποία εσείς χρησιμοποιείτε. Φυσικά προσφέρουμε σταθερή ποιότητα προϊόντων στα πλαίσια των δικών μας Γενικών Όρων Πωλήσεων και Παράδοσης.

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 25°C