



Használati utasítás

Quadrant Uni-1-Bond

Leírás

A **Quadrant Uni-1-Bond** olyan általánosan felhasználható fényre kötő, egykomponensű ragasztóanyag, amely adhezív technikával végzett restaurációknál alkalmazható. A **Quadrant Uni-1-Bond** egy lépésben tömít és ragaszt. A **Quadrant Uni-1-Bond** etanol bázisú, fény hatására aktiválódó adhezívekből előállított ragasztó. A **Quadrant Uni-1-Bond** alkalmazása előtt a fogfelszín **Quadrant Total Etch**-el kezelje.

Összetétel

A **Quadrant Total Etch** tartalmaz

- 20 százalékos foszforsavat

A **Quadrant Uni-1-Bond** tartalmaz

- metakrilátot
- etanolt
- fotoiniciátorokat

Indikációk

- Kompozit tömőanyagok fogzománchoz és dentinhez való ragasztása.
- A fogak különösen érzékeny területeinek lezárása.

Kölcsönhatások egyéb anyagokkal

Ne használjuk eugenolt tartalmazó anyagokkal együtt, mivel azok akadályozzák a polimerizációt.

A fogászati alkalmazás lépései

1. A kompozit restaurációknál szokásos útmutatásnak megfelelően készítsük elő a fogüreget. Az előkészített kavitást tisztítsuk ki és szárítsuk meg. Ajánlatos kofferdam alkalmazása. Szabad gyökércsatorna kezelése során előfordulhat, hogy az előkészítésre nem lesz szükség.
2. A restaurálandó zománcre és dentinre vigyünk fel **Quadrant Total Etch** gélt és hagyjuk rajta 15-30 másodpercig.
3. Legalább 5 másodpercen keresztül alaposan öblítsük le a **Quadrant Total Etch** gélt és az előkészített helyről gyenge légárammal távolítsuk el a felesleges nedvességet. A legjobb kötési eredményt akkor kapjuk, ha a **Quadrant Uni-1-Bond** anyagot nedves és fényes dentinre visszük fel. Ha szemmel kívánjuk ellenőrizni, hogy a zománccmaratás megtörtént-e, akkor a kavitást alaposabban szárítsuk ki. Kellő mértékű maratás esetén a zománc felszíne homályosan fehér színt mutat. Ilyen esetben a **Quadrant Uni-1-Bond** felvitele előtt a preparálás teljes felszínét vízzel (például vizes labdaccsal) újból be kell nedvesíteni.
4. A **Quadrant Uni-1-Bond** anyagot a felesleges víz eltávolítása után haladéktalanul vigyük fel.
5. Az applikátor végét vagy egy puha egyszer használatos kefét mártunk bele a **Quadrant Uni-1-Bond**-ba és bőséges mennyiséget vigyünk fel a kavitás teljes felszínére.
6. További két réteg **Quadrant Uni-1-Bond** felvitelét követően várjunk 15 másodpercig.
7. Az oldószer és a felesleges nedvesség elpárologtatásához gyöngye légáram segítségével óvatosan terítsük el egyenletesen a **Quadrant Uni-1-Bond** anyagot (mintegy 2-5 másodpercen keresztül).
8. Amennyiben ezen lépést követően a kavitás felszíne nem egyenletes fényes, a fentiekben leírt módon alkalmazzunk további **Quadrant Uni-1-Bond** rétegeket.
9. Hagyományos fotopolimerizációs készülékkel 20 másodpercig polimerizáljuk a **Quadrant Uni-1-Bond**-ot.
10. A helyreállítási anyagot a gyártó utasításainak megfelelően vigyük fel.

Óvintézkedések

- A **Quadrant Total Etch** 20 százalékos foszforsavat tartalmaz. A **Quadrant Uni-1-Bond** metakrilátot tartalmaz. Szembe vagy bőrre kerülése irritációt okozhat. Ha a szer véletlenül szembe kerül vagy bőrrel érintkezik, haladéktalanul öblítsük le bőséges vízzel, szükség esetén forduljunk orvoshoz. Érzékenységre megelőzésére kerüljünk a szer bőrrel való érintkezésére.
- A **Quadrant Uni-1-Bond** etanolt tartalmaz. Az etanol fokozottan gyúlékony szer. A **Quadrant Uni-1-Bond**-ot tartssuk gyúlékony anyagoktól távol. Ne dohányozzon! Ne lélegezze be a gőzöket!

Tárolási tanácsok

A szert ajánlatos hűtőben tárolni. Ne használjuk az anyagot eltarthatósági időn túl. Ne tartssuk az anyagot közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Az elpárolgás megakadályozására használat után mindig alaposan zárjuk le a tárolóedényt. Gyermekektől távol tartandó!

Gyártva Németországban.
Kizárólag fogászati használatra!

Csomagolás

Quadrant Uni-1-Bond: 4 ml fényre kötő, egy komponensű ragasztóanyag tégelyben.

Quadrant Total Etch: 2,5 ml-es fecskendő.

Használati tanácsainkat cégünk részéről a legjobb jóhiszemben adjuk, akár írásban, akár szóban, akár bemutató alapján, de a garanciavállalás kizárásával. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha harmadik személy tulajdonosi jogairól van szó. Ez nem mentesíti Önöket az alól, hogy az általunk szállított termékeket a felhasználás és az alkalmazás tekintetében alkalmasság szempontjából megvizsgálják. A termékek alkalmazására, felhasználására és feldolgozására nem lehetünk befolyásolással, ennél fogva az említettek teljes mértékben az Önök felelősségi körébe tartoznak. Amennyiben ezen kötelezettség következtében bármiféle károsodás keletkezne, anyagi felelősségünk legfeljebb a szállításonként tárgyát képező, és az Önök által felhasznált termékek értékére korlátozódik. Mi a magunk részéről természetesen termékeinkre állandó minőséget biztosítunk az Általános értékesítési és szállítási feltételeinknek megfelelően.

25 °C-nál nagyobb hőmérsékleten tárolni tilos