



Quadrant Uni-1-Bond

OPIS

Quadrant Uni-1-Bond jest jednoskładnikowym systemem wiążącym o uniwersalnym zastosowaniu. **Quadrant Uni-1-Bond** jest opartą na etanolu formułą światło – utwardzalną. Dla uzyskania optymalnego efektu zaleca się wytrawienie zębów przy użyciu **QuadrantTotal Etch**.

SKŁAD

QuadrantTotal Etch zawiera:

- 20% kwasu fosforowego

Quadrant Uni-1-Bond zawiera:

- Metacryl
- Etanol
- Foto – inicjatory

ZASTOSOWANIE

- Materiały kompozytowe wypełniające (szkliwo, zębina)
- Zabezpieczenie nadwrażliwych obszarów zębów

INTERAKCJA Z INNYMI MATERIAŁAMI

Quadrant Uni-1-Bond nie powinien być używany z materiałami zawierającymi eugenol, ponieważ ma to ujemny wpływ na polimeryzację.

PROCEDURY KLINICZNE

1. Opracuj ubytek zgodnie z generalnymi zaleceniami dla kompozytowych wypełnień, następnie oczyść i wysusz preparowane miejsca. Zalecane jest użycie koferdanu.
2. Nałóż żel **QuadrantTotal Etch** w celu wytrawienia szkliwa lub zębiny i pozostaw na 15 – 30 sekund.
3. Po dokładnym splukaniu **QuadrantTotal Etch** (przez przynajmniej 5 sekund) usuń nadmiar wilgoci z opracowywanego miejsca za pomocą delikatnego strumienia powietrza, ponieważ najlepszy efekt uzyskuje się nakładając **Quadrant Uni-1-Bond** na wilgotną powierzchnię.
4. Nałóż **Quadrant Uni-1-Bond** niezwłocznie po usunięciu nadmiaru wody.
5. Za pomocą aplikatora rozprowadź **Quadrant Uni-1-Bond** na całej opracowywanej powierzchni ubytku.
6. Nałóż dwie warstwy **Quadrant Uni-1-Bond** i poczekaj 15 sekund.
7. Delikatnie (strumieniem powietrza) osusz ubytek, aby usunąć rozpuszczalnik i nadmiar wilgotności – około 2 – 5 sekund.
8. Jeżeli powierzchnia nie jest jednolicie pokryta, należy ponownie nałożyć **Quadrant Uni-1-Bond**.
9. Polimeryzuj **Quadrant Uni-1-Bond** przez 20 sekund za pomocą lampy światło – utwardzającej.
10. Umieść materiał do wypełnień według instrukcji producenta.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Ponieważ **QuadrantTotal Etch** zawiera 20% kwasu fosforowego, a **Quadrant Uni-1-Bond** zawiera metakryl należy szczególnie uważać, gdyż w przypadku kontaktu z oczami i skórą może wystąpić nadwrażliwość. W razie kontaktu preparatu z oczami lub skórą należy natychmiast splukać wodą i jeśli zaistnieje taka potrzeba to skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
- **Quadrant Uni-1-Bond** należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, ponieważ zawiera etanol, który jest łatwopalny.

SKŁADOWANIE

Zaleca się przechowywanie preparatu w lodówce. Nie używać po wygaśnięciu daty ważności. Nie przechowywać w miejscach nasłonecznionych. Przestrzegać dokładnego zamknięcia preparatu po użyciu. Chronić przed dziećmi.

Wyprodukowano w Niemczech.

Preparat przeznaczony tylko do użytku w stomatologii.

OPAKOWANIE

Quadrant Uni-1-Bond – butelka 4 ml.

Quadrant Total Etch – strzykawka 2,5 ml.

Informacje techniczne na temat naszego produktu są przekazane wyłącznie w dobrej wierze, ale bez gwarancji i to stosuje się również w momencie gdzie własność praw osób trzecich wchodzi w grę. Nie zwalnia to jednak z obowiązku zbadania przez Ciebie materiałów przez nas dostarczonych pod kątem zastosowania. Ponieważ zastosowanie w/w materiałów oraz jego użycie odbywa się poza naszą kontrolą, nie ponosimy z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.