



Quadrant Uni-1-Bond

Tanımlama

Quadrant Uni-1-Bond, adeziv restorasyonlarla kombinasyonda üniversal kullanım için ışınla sertleşen, tek komponentli bonding ajanıdır.

Quadrant Uni-1-Bond tek adımda hem primer hem de bond işlevi görür. **Quadrant Uni-1-Bond**, ışınla aktive olan etanol bazlı adeziv rezindir. **Quadrant Uni-1-Bond** uygulamadan önce, diş yüzeyi **Quadrant Total Etch** ile uygun duruma getirilmelidir.

Bileşimi

Quadrant Total Etch

- %20 fosforik asit içerir

Quadrant Uni-1-Bond

- Metakrilat
- Etanol
- Işınla sertleşmeyi başlatan madde içerir

Endikasyonları

- Kompozit dolgu materyalinin mine ve dentine bağlanması.
- Dişlerin hipersensitif alanlarının örtülmesi.

Diğer Materyallerle Etkileşimler

Polimerizasyonu bozduğu için öjenol içeren restoratiflerle kombine kullanılmamalıdır.

Klinik İşlem

1. Kompozit restorasyonlar için genel talimatlara göre kaviteyi prepare ediniz. Preparasyonu temizleyiniz ve kurutunuz. Rubber dam kullanılması önerilmektedir. Açığa çıkan kök yüzeylerinin restorasyonunda, kavite preparasyonu gerekli olmayabilir.
2. Restore edilecek mine ve dentine **Quadrant Total Etch** jel uygulayınız ve 15-30 saniye bekleyiniz.
3. 5 Saniye boyunca **Quadrant Total Etch** jeli iyice yıkayınız ve hafif hava sıkarak preparasyondan fazla nemi uzaklaştırınız.
- Quadrant Uni-1-Bond** nemli ve parlak dentine uygulandığında en iyi bonding etkisi sağlanır. Minenin etchinglelendiğini görsel olarak doğrulamak isterseniz, kavitenin çok daha kuvvetli kurutulması gerekir. Yeterli etchinglelendiğinde mine yüzeyi mat beyazlık gösterecektir. Eğer böyleyse; tüm preparasyon yüzeyi, **Quadrant Uni-1-Bond** uygulamadan önce su ile (nemli bir pamuk peletle) yeniden nemlendirilmelidir.
4. Fazla su uzaklaştırıldıktan sonra hemen **Quadrant Uni-1-Bond** uygulanmalıdır.
5. Aplikatör ucu ya da yumuşak bir disposable fırçayı **Quadrant Uni-1-Bond** da iyice ıslatınız ve tüm kavite yüzeyine iyice uygulayınız.
6. 2 Tabaka **Quadrant Uni-1-Bond** uygulayınız ve 15 saniye bekleyiniz.
7. Uçucu içeriği ve fazla nemi uzaklaştırmak için hafif hava uygulayarak (yaklaşık 2-5 saniye) **Quadrant Uni-1-Bond** u hafifçe yayınız.
8. Bu adımdan sonra kavite yüzeyi üniform şekilde parlak değilse, yukarıda anlatıldığı gibi 2 tabaka daha **Quadrant Uni-1-Bond** uygulayınız.
9. Standart ışınli dolgu cihazıyla 20 saniye ışınlayarak **Quadrant Uni-1-Bond** u polimerize ediniz.
10. Üretici firmanın talimatına göre restoratif materyali yerleştiriniz.

Güvenlik Önlemleri

- **Quadrant Total Etch** %20 fosforik asit içerir. **Quadrant Uni-1-Bond** metakrilat içerir. Gözle ve deriyle teması hassasiyete neden olabilir. Deri ya da gözle kazayla temasında bol miktarda suyla yıkayınız ve gerekiyorsa bir doktora danışınız. Hassasiyeti önlemek için deriyle temasından sakınınız.
- **Quadrant Uni-1-Bond** etanol içerir. Etanol yüksek derecede yanıcıdır. **Quadrant Uni-1-Bond** ateş kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara içilmemelidir. Buharı solunmamalıdır.

Saklama Koşulları

Buzdolabında saklanması önerilir. Son kullanım tarihinden sonra materyali kullanmayınız. Direkt gün ışığında tutmaktan kaçınınız. Materyalin buharlaşmasını önlemek için daima kullandıktan sonra kapağını sıkıca kapatınız. Çocukların erişemeyeceği yerde tutunuz.

Almanya'da üretilmiştir.

Yalnızca dental kullanım içindir.

Paketleme

Quadrant Uni-1-Bond: ışınla sertleşen, tek komponentli bonding ajanı, 4 ml lik şişede.

Quadrant Total Etch: 2.5 ml lik şırıngada.

Sözlü, yazılı veya denemelerle verdiğimiz teknik tavsiyeler güvenle ancak garanti verilmeden yapılmıştır, ve bu aynı zamanda üçüncü kişilerin mal sahipliği haklarını da kapsar. Bu sizi belirtilen prosesler ve kullanımlar için tarafımızdan sağlanan ürünleri test etmek zorunluluğundan uzaklaştırmaz. Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve prosesleri bizim kontrolümüzün ötesindedir ve bu yüzden tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sorumluluğa rağmen belirtilen herhangi bir zarar bizim tarafımızdan verilen ve sizin tarafınızdan kullanılan malın değerleriyle limitli olacaktır. Tabii ki, ürünlerimizin uygun kalitesini Genel Satış ve Dağıtım Koşullarımızın içinde sağlayacağız.

25°C in altında saklayınız

CAVEX HOLLAND BV Harmenjansweg 19
P.O. Box 852, 2003 RW Haarlem, The Netherlands
Tel. +31 23 530 77 00, Fax +31 23 535 64 82
E-mail: dental@cavex.nl Website: www.cavex.nl

CAVEX