



Quadrant UniBond

Quadrant UniBond è un sistema adesivo che consente di ottenere i migliori risultati in odontoiatria adesiva. Si compone di Quadrant Total Etch, Quadrant UniBond Primer e Quadrant UniBond Sealer. Quadrant Total Etch è un gel a base di acido fosforico, Quadrant UniBond Primer è un primer per la dentina e Quadrant UniBond Sealer è un sigillante radiopaco caricato che rilascia fluoro.

Composizione

Quadrant Total Etch contiene il 20% di acido fosforico.

Quadrant UniBond Primer contiene etanolo, metacrilato diossietilico e acido maleico.

Quadrant UniBond Sealer contiene Bis-GMA.

Indicazioni

- Adesivo per otturazioni in composito (Quadrant Universal LC, Quadrant Anterior Shine, Quadrant Posterior Dense o Quadrant Core LC)
- per restaurazioni al colletto.

Interazioni con altri prodotti

Non utilizzare con preparati a base di eugenolo, poichè l'eugenolo inibisce la polimerizzazione dei compositi.

Uso

1. Eseguire la preparazione secondo i criteri usati per i restauri con composito. Si consiglia l'uso della diga. Il colletto dei denti scoperto in generale non richiede preparazione. Se si usa un cemento composito, seguirne le istruzioni per l'uso.
2. Applicare Quadrant Total Etch su smalto e dentina e far agire per 15-30 sec [1].
3. Sciacquare Quadrant Total Etch per almeno 15 sec [2].
4. Asciugare la cavità con aria senza olio [3].
 - In caso di restauro a sandwich, in cui tutta la dentina viene coperta con cemento vetroionomerico, o se la dentina non è interessata, le fasi 5 e 6 sono da saltare.
5. Sfregare Quadrant UniBond Primer sulla dentina per 30 sec. con una Q-Brush. L'adesione allo smalto non è influenzata da Quadrant UniBond Primer [4].
6. Con un leggero soffio d'aria distribuire il prodotto uniformemente [5].
7. Applicare accuratamente Quadrant UniBond Sealer con una nuova Q-Brush su dentina e smalto [6].
8. Distribuire con un lieve getto d'aria. Evitare la contaminazione con la saliva [7].
9. Polimerizzare per 20 sec. Lasciare intatto lo strato non polimerizzato di superficie [8].
10. Applicare il composito secondo le istruzioni del prodotto.

Sicurezza

Quadrant Total Etch:

Contiene il 20% di acido fosforico. Irritante per occhi e pelle. Evitare il contatto con occhi, mucosa ed elementi adiacenti. In caso di contatto diretto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

Quadrant UniBond Primer

Infiammabile.

Quadrant UniBond Sealer

Quadrant UniBond Sealer contiene monomeri polimerizzabili (quali esteri di acido (met)acrilico polifunzionali) che in soggetti sensibili possono provocare irritazioni. Non applicare il prodotto in caso di accertate irritazioni o allergie al metacrilato. Evitare il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto diretto sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico.

Conservazione

Conservare in frigorifero. Non utilizzare dopo la scadenza. Non esporre direttamente ai raggi solari. Chiudere bene la confezione per evitare che i componenti volatili evaporino. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Prodotto in Germania

Il prodotto può essere utilizzato solo dai dentisti.

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove od esperimenti, ha luogo sulla scorta delle nostre migliori conoscenze, deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne eventuali diritti di proprietà industriali di terzi, e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l'idoneità o no ai procedimenti ed ai fini previsti.

L'applicazione, l'impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Nel caso tuttavia che si esiga una responsabilità, questa sarà limitata, per tutti i danni, al valore dei prodotti da noi forniti ed impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una qualità ineccepibile dei nostri prodotti a norma delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna.