



Quadrant UniChem - Paste Only Pack

Quadrant UniChem is een universele, chemisch hardende, fluoride-afgevende, radiopaak Micro-glass composiet. Het kan toegepast worden na gebruik van een chemisch hardende bonding (UniChem self-curing adhesive) of een met licht hardende bonding op basis van Bis-GMA (Quadrant UniBond).

Samenstelling

Het product is gebaseerd op acrylaten.

Quadrant UniChem bevat 64 vol%, 77 gew% vulstof:

- Ba-Al-F-silicaatglas (0,02-2,0 µm)
- siliciumdioxide (0,02-0,07µm)

Indicaties

- restauraties klasse I, II, III, IV, V
- spalken na traumata
- opbouwen

Indien gebruikt met UniChem self-curing adhesive dient de outline geheel in het glazuur te liggen.

Interacties met andere middelen

Niet gebruiken in combinatie met eugenolhoudende preparaten, daar eugenol de uitharding verhindert.

Gebruik

1. Preparatie volgens de algemeen geldende regels voor composietrestauraties, aansluitend de caviteit reinigen en drogen. Bij zeer diepe caviteiten is het aan te bevelen zeer lokaal een minimale hoeveelheid calciumhydroxide-preparaat aan te brengen. Het gebruik van kofferdam wordt geadviseerd.
2. Gebruik Quadrant UniBond of een ander universeel bonding systeem naar keuze op basis van Bis-GMA volgens de gebruiksaanwijzingen van dat product. Laat de zuurstofgeremde laag aan het oppervlak intact.
3. Gelijke hoeveelheden van de UniChem pasta's mengen met een plastic spateltje. Gebruik de verschillende kanten van de spatel voor het uitnemen van de catalyst- en base-paste uit de potjes om contaminatie van de pasta's te voorkomen. Voorkom het insluiten van luchtballen tijdens mengen.
mengtijd: 30-40 sec.
verwerkingstijd: 2¹/₂-2³/₄ min.
uithardingstijd: 2¹/₂-2³/₄ min.
4. Breng Quadrant UniChem aan in de caviteit en laat het uitharden.
5. Quadrant UniChem kan direct na uitharden worden afgewerkt en gepolijst met fijne diamantboren, flexibele schijfjes en siliconen points.

Veiligheid

Quadrant UniChem bevat polymeriseerbare monomeren (b.v. meergefunctionele (meth)acrylzuur-esters) welke bij overgevoelige personen irritaties kunnen veroorzaken. Bij eventuele irritaties of bij bekende allergieën op basis van methacrylaat dient het product niet te worden toegepast. Huid- en oogcontact vermijden. Bij oogcontact direct met veel water spoelen en een arts consulteren.

Bewaren

In de koelkast bewaren. Na afloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken. Direct zonlicht vermijden. Verpakking na gebruik steeds goed afsluiten en buiten bereik van kinderen houden.

Geproduceerd in Duitsland

Uitsluitend voor tandheelkundige doeleinden bestemd.

Onze adviezen met betrekking tot de technische toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven worden naar beste weten verstrekt, doch gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen, ook ten aanzien van eventuele beschermende rechten van derden. Zij ontslaan u niet van de verplichting, de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde procédés en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vinden plaats buiten onze controlemogelijkheden. Zij vallen derhalve onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en door u gebruikte goederen. Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.