



# PROTOCOL VOOR DE PERFECTE AFDruk

## 1. Doseren

- Vul de container regelmatig bij zodat deze minimaal half vol is tijdens het doseren.

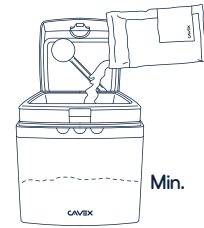


- Roer het alginat goed door voor gebruik.

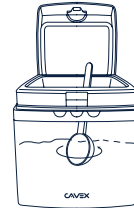

- Vul de maatlepel en strijk in één beweging af langs de afstrijkrand aan de binnenkant van de container.

Tip: Gebruik drie schepjes alginat voor een afdruk van de onderkaak en vier voor de bovenkaak.

- Zorg voor de juiste mengverhouding van poeder en water, zoals aangegeven op de verpakking.

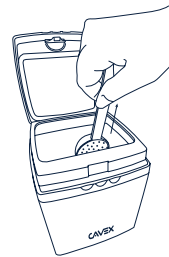

## 2. Mengen

Tip: Gebruik de Cavex waterdoseerflacon om de exacte verhouding te bepalen.

- Handmatig: minimaal 30 seconden krachtig spatelen tot een homogene mix ontstaat zonder luchtballen.
- Mixer: Meng volgens het protocol van de mixer voor een gegarandeerd resultaat zonder luchtballen.

Tip: Bij gebruik mixer kort voorroeren met het roerstaafje. Dit voorkomt dat het alginat in de mixer terecht komt.



## 3. Keuze afdruklepel

- Kies voor een afdruklepel met voldoende retentie (rimlock / perforatie).
- Zorg dat de afdruklepel alle elementen omvat met een extra ruimte van 5 mm.



**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**

## PROTOCOL VOOR DE PERFECTE AFDRUK


### 4. De afdruk nemen

- Maak altijd een volledige afdruk. Dit voorkomt deformatie.

Tip: Laat de patiënt spoelen met water om eventueel dik speeksel te verwijderen. In dat geval is voorstrijken met algiinaat niet nodig.


Tip: Bij brackets of ondersnijdingen utilitywax of uitblokwas gebruiken.

Tip: Vul de afdruklepel gelijkmatig maar in één beweging om luchtbellen te voorkomen. Zorg voor extra algiinaat aan de labiale zijde en minder ter hoogte van de A-lijn. Gebruik ruim voldoende algiinaat bij een hoog palatum.

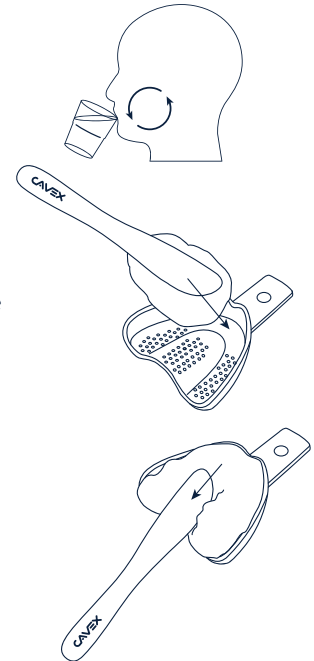

### 5. Na de afdruk


- Spoel de afdruk af onder de kraan om speeksel en eventuele bloedresten te verwijderen.
  - Controleer de afdruk: alle elementen compleet / omslagplooï / palatum / geen luchtbellen op kritische plaatsen / gecentreerd / niet doorgedrukt, bewogen of gescheurd.
  - Voorkom contaminatie door de afdruk met een geschikt desinfectiemiddel te desinfecteren.
- Tip: Desinfecteer de afdruk in 3 minuten met Cavex ImpreSafe.
- Spoel de afdruk opnieuw af onder de kraan en klop overmatig water af.

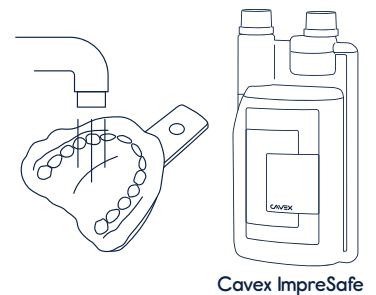

Cavex ImpreSafe

### 6. Opslag en transport

- Plaats de afdruk in een plastic gripzak en sluit deze zorgvuldig af.
- Voeg géén wattenrollen, tissues of extra water toe.
- Bewaar de afdruk bij kamertemperatuur.
- Alle Cavex alginaten zijn tot 48 uur dimensioneel stabiel, met uitzondering van Cavex ColorChange (tot 9 dagen).

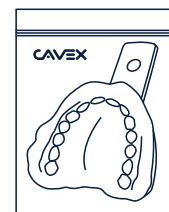

**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**