

CAVEX IMPRESAFE PROTOCOL VOOR DESINFECTIE

-
Desinfectant – doodt bacteriën, schimmels en virussen – voor het desinfecteren van
alginaat-, polyether- en siliconenafdrukken.

Mengverhouding: 30 ml desinfectant op 1 liter water. Contacttijd: 3 minuten.



1. Knijp de fles in en vul de maatcup tot 30 ml.



5. Laat de afdruk in de vloeistof zakken. Drie minuten laten inwerken; gebruik de timer.



2. Schenk eerst water (zie TIP 1) in de container tot aan het aangegeven merkteken (circa 1 liter).



6. Haal het rekje na 3 minuten uit het desinfectant.



3. Schenk desinfectant in de container.



7. Afspoelen met water.



4. Plaats de afdruk op het rekje in de container.



8. Schud het overtollige water van de afdruk en doe deze in een plastic zakje. Sluit het zakje luchtdicht af. Noteer 'gedesinfecteerd' op het zakje.

TIP 1. Vul de container altijd eerst met water, gevolgd door het desinfectant. Zo voorkomt u schuimvorming.

TIP 2. Ververs de vloeistof elke week, of zodra deze er vervuild uitziet.

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

CAVEX IMPRESAFE PROTOCOLE POUR LA DÉSINFECTION

Désinfectant – détruit les bactéries, champignons et virus – pour désinfecter les empreintes en alginate, en polyéther et en silicone.

Dosage : 30 ml de désinfectant pour 1 litre d'eau. Temps d'action : 3 minutes.



1. Pressez le flacon et remplissez le doseur jusqu'à 30 ml.



5. Plongez l'empreinte dans le fluide. Laissez agir trois minutes ; utilisez le minuteur.



2. Versez en premier l'eau (voyez CONSEIL 1 dans conteneur jusqu'au niveau indiqué (environ 1 litre).



6. Retirez le porteempreinte du désinfectant au bout de 3 minutes.



3. Versez ensuite le désinfectant dans le conteneur.



7. Rincez à l'eau.



4. Placez l'empreinte sur le porte-empreinte dans le conteneur.



8. Secouez l'excès d'eau de l'empreinte et mettez celle-ci dans un sachet en plastique. Fermez hermétiquement le sachet. Inscrivez 'désinfecté' sur le sachet.

CONSEIL 1. Remplissez toujours le conteneur d'abord d'eau ensuite de désinfectant. Vous évitez ainsi la formation de mousse.

CONSEIL 2. Renouvelez le fluide chaque semaine ou dès qu'il paraît trouble.

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**