

PREMIUM ORAL CARE

CAVEX ORAL PRE RINSE

-
Enjuague bucal previo al tratamiento
con peróxido de hidrógeno
estabilizado al 1,5 %.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ORAL CARE

CAVEX ORAL PRE RINSE

Descripción del producto:

Cavex Oral Pre Rinse contiene 1,5% de peróxido de hidrógeno estabilizado. El efecto del oxígeno activo del peróxido de hidrógeno reduce la cantidad total de microorganismos que se pueden escapar por aerosoles y actúa como agente blanqueador eliminando manchas en los dientes.

Indicaciones:

Cavex Oral Pre Rinse se puede utilizar como un enjuague previo al tratamiento antes de comenzar cualquier procedimiento dental.

Ingredientes:

Agua, eritritol, glicerol, peróxido de hidrógeno, poloxámero, copolímero de PVM / MA, sabor a menta, sacarina de sodio.

Instrucciones:

Cavex Oral Pre-Rinse es una solución acuosa lista para usar inmediatamente. Usar en pacientes a partir de los 18 años. Enjuague con 10-15 ml. durante 30-60 segundos. Siga siempre las instrucciones del dentista.

Advertencia de seguridad:

Para usar solo según las indicaciones de los profesionales dentales. Evitar contacto con los ojos. Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua si el producto entra en contacto con ellos. No lo tragues. ¡Contiene peróxido de hidrógeno!

Contenido:

500 ml de solución acuosa con vaso dosificador suficiente para unos 50 enjuagues bucales aproximadamente.

Almacenamiento:

Botellas sin abrir: 1 año en refrigeración.
Botella abierta: 1 mes a temperatura ambiente.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX