

VERSLETEN VULLINGEN EN RESTAURATIES

Een versleten vulling of restauratie kan na verloop van tijd en door verschillende oorzaken lelijk worden (verkleuring, slijtage etc.) Gelukkig kan uw tandarts hier, over het algemeen vrij makkelijk, iets aan doen.




Moderne restauratiematerialen hebben een sterke gelijkenis met echte tanden. De tandarts kan dus een restauratie maken die eigenlijk niet van de echte tanden te onderscheiden is. Deze restauratie wordt gedaan met kunststof, ook wel composiet genoemd. De composiet kan aan de beschadigde tand worden "geplakt" en vervangt nagenoeg onzichtbaar de oude restauratie. Door deze techniek is het mogelijk om, in slechts één bezoek aan uw tandarts, uw tand te repareren.

Wat gaat de tandarts precies doen?




Stap 1. De tandarts zal de "oude" restauratie zonnodig verwijderen door deze met een boor **weg te slijpen**.

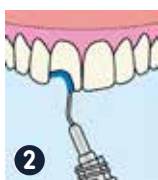

Stap 2. Na het wegslijpen en schoonmaken brengt de tandarts een vloeistof aan die het glazuur van de tand opruwt. Dit noemen we **etsen**. Dit etsen zorgt er voor dat de kunststof beter aan de tand blijft plakken.



Stap 3. De etsvloeistof zal worden weggespoeld met water, waarna de tandarts de tand heel goed **droog blaast**.

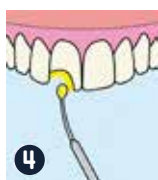

Stap 4. Om kunststof aan een tand te kunnen plakken wordt eerst een laag "lijm" aangebracht, ook wel **bonding** genoemd.



Stap 5. Na het aanbrengen van de bonding schijnt de tandarts er met blauw licht op, waardoor de hechtlaag **sterk** wordt.



Stap 6. Nu kan de kunststof worden aangebracht. De tandarts bouwt laagje voor laagje de tand op een **modelleert** de kunststof in de juiste vorm.



Stap 7. De kunststof wordt ook weer **hard** gemaakt met een blauw licht.



Stap 8. Als de tand is gerepareerd zal de tandarts de tand nog wat **slijpen en polijsten**.

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

VERSLETEN VULLINGEN EN RESTAURATIES



Genoemde methode is een mogelijkheid om uw situatie te verbeteren. Er zijn vaak ook andere methoden beschikbaar. Vraag uw tandarts naar de alternatieve mogelijkheden en overleg de voor u meest geschikte aanpak.

Veel voorkomende vragen:

1. Wat kost deze behandeling?

Dat verschilt per behandeling. Uw tandarts kan een goede inschatting maken van de kosten. Vraag uw tandarts vooraf om een prijsopgave.

2. Dekt mijn verzekering de kosten?

Dit hangt tegenwoordig af van uw verzekering. Wij raden u aan contact met uw verzekering op te nemen.

3. Hoe lang duurt de behandeling ongeveer?

Dit hangt altijd af van de situatie. Gemiddeld duurt een dergelijke behandeling 1 uur.

4. Kan ik meteen weer eten na debehandeling?

Geen probleem. Zodra de tandarts klaar is kunt u alles weer eten.

5. Moet ik worden verdoofd?

Afhankelijk van de diepte of het oppervlak van de "reparatie", kan het gebeuren dat de tandarts besluit te verdoven.

Deze folder is tot stand gekomen door Cavex Holland BV in samenwerking met tandartsen. Het doel van deze folder is het voorlichten van patiënten over de mogelijkheden van de moderne tandheelkunde. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website: www.cavex.nl

**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**