

Cavex Set Up Wax – Aangepaste verwerking

Helaas heeft Cavex, door het niet meer leverbaar zijn van een specifieke grondstof, de receptuur van de Set Up Wax moeten aanpassen. De nieuwe receptuur houdt dezelfde technische specificaties maar blijkt in de praktijk aanzienlijk gevoeliger voor oververhitting. Dit doet zich met name voor bij de Cavex Set Up Regular was. De onderlinge samenhang van de was wordt aanzienlijk minder waardoor de verwerking problemen geeft.

Indien u vaststelt dat de was korrelig wordt, slecht kleeft bij het maken van een wasrol, of de hechting aan tanden minder is, dan wordt dat veroorzaakt door het verwarmen van de was tot een te hoge temperatuur. Helaas is de was na oververhitting niet meer te verwerken.

De ruime marge die we hierbij hadden bij de oude was is nu een stuk minder. Wij adviseren daarom om de luchttoevoer van de brander te verlagen en tevens de was korter in de vlam te houden. Tevens adviseren wij om de wasplaten bij gebruik van een waterbad tot maximaal 48 graden te verwarmen. Op onze website staan twee video's waarbij als voorbeeld een waswal en een standaard was opstelling wordt gemaakt.

Mocht u, ondanks de geadviseerde aangepaste procedure, toch nog problemen ondervinden dan kan het zijn dat onze Cavex Set Up Regular, Soft, Hard of Extra Hard een oplossing biedt. Daarnaast is er een Cavex Set Up Regular Flex ontwikkeld die wat minder gevoelig is en voor veel gebruikers een goed alternatief is gebleken.

-