


## Cavex SiliconA voor functionele- en monofase-afdrucken

### Functionele afdrucken (Putty & Injection Type)

- 1)  Breng Cavex SiliconA Adhesive aan op de individuele lepel.
- 2)  Breng een strip Cavex SiliconA Putty aan. Mengverhouding 1 : 1
- 3)  Masseer wangen en lippen.
- 4)  Maak de functionele afdruk.
- 5)  De functionele marges bepalen nu de reikwijdte van spieren en ligamenten.
- 6)  Breng Cavex SiliconA Adhesive aan.
- 7)  Breng Cavex SiliconA Injection Type aan in de lepel en maak de afdruk.
- 8)  Verwijder de afdruk uit de mond en desinfecteer deze (3 minuten in Cavex ImpreSafe)

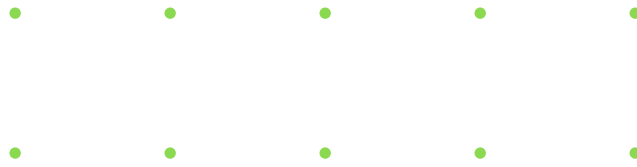



## Cavex SiliconA voor functionele- en monofase-afdrucken

### Monofase afdruk (Heavy Body)

- 1)  Situatie implantaten.
- 2)  Pas de individuele lepel.
- 3)  Breng Cavex SiliconA Adhesive aan op de individuele lepel.
- 4)  Breng een strip Cavex SiliconA Putty aan.  
Mengverhouding 1 : 1
- 5)  Masseer wangen en lippen en neem de afdruk.
- 6)  Vul de tray met Cavex SiliconA Heavy Body.
- 7)  Breng Cavex SiliconA Heavy Body rondom de implantaten aan.
- 8)  Plaats de lepel in de mond.
- 9)  Verwijder de afdruk uit de mond en desinfecteer deze (3 minuten in Cavex ImpreSafe)

