


## Cavex SiliconA voor monofase-afdrucken (Sandwich techniek)

### Putty & Injection Type

- 1)  Breng Cavex SiliconA Adhesive aan op een convectie lepel.
- 2)  isoleer en plaats het retractiedraad.
- 3)  Meng Cavex SiliconA Putty.  
Mengverhouding 1 : 1
- 4)  Kleden totdat de kleur homogeen is.  
Plaats de gemengde putty in de lepel.
- 5)  Breng Cavex SiliconA Injection Type aan rondom het geprepareerde gebied.
- 6)  Lepel stevig plaatsen, stilhouden (zonder druk) totdat het materiaal is uitgehard.
- 7)  Verwijder de afdruk uit de mond en desinfecteer deze (3 minuten in Cavex ImpreSafe)

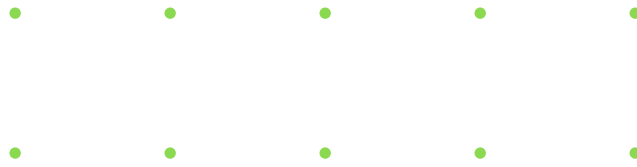



## Cavex SiliconA voor monofase-afdrukken (Sandwich techniek)

### Heavy Body & Injection Type

- 1)  Verkleuring van frontale en laterale snijtand.
- 2)  Tanden prepareren.
- 3)  Isoleer en plaats het retractiedraad.
- 4)  Breng Cavex SiliconA Injection Type aan rondom de geprepareerde tanden.
- 5)  Breng Cavex SiliconA Adhesive aan in de lepel. Vul de convector lepel met Cavex SiliconA Heavy Body. Lepel stevig plaatsen en stilhouden.
- 6)  Verwijder de afdruk uit de mond en desinfecteer deze (3 minuten in Cavex ImpreSafe)

