


## Cavex SiliconA pour empreintes monophasé (technique sandwich)

### Type Putty & Injection

- 1)  Appliquez Cavex SiliconA Adhesive sur un porte-empreinte individuel.
- 2)  Isolez et placez le fil de rétraction.
- 3)  Mélangez Cavex SiliconA Putty. Proportion de mélange 1 : 1
- 4)  Malaxez jusqu'à ce que la couleur soit homogène. Mettez le putty mélangé dans un porte-empreinte.
- 5)  Appliquez Cavex SiliconA type Injection autour de la zone préparée.
- 6)  Positionnez le porte-empreinte fermement, maintenez-le sans bouger (sous pression) jusqu'à la prise.
- 7)  Retirez l'empreinte de la bouche et désinfectez-la (3 minutes dans Cavex ImpreSafe)

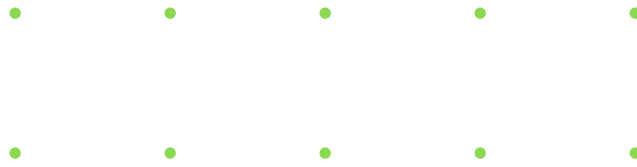



## Cavex SiliconA pour empreintes monophasé (technique sandwich)

### Type Heavy Body & Injection

- 1)  Décoloration de l'incisive frontale et latérale.
- 2)  Préparez les dents.
- 3)  Isolez et placez le fil de rétraction.
- 4)  Appliquez Cavex SiliconA type Injection autour des dents préparées.
- 5)  Appliquez Cavex SiliconA Adhesive sur un porte-empreinte. Remplissez le porte-empreinte individuel avec Cavex SiliconA Heavy Body. Positionnez fermement le porte-empreinte et maintenez-le sans bouger.
- 6)  Retirez l'empreinte de la bouche et désinfectez-la (3 minutes dans Cavex ImpreSafe)

