

## Protocol Cavex Alginate Mixer II



### Gebruiks-aanwijzing:

1. Hoeveelheid alginatpoeder en water doseren en in het mengbakje doen

aanbevolen dosering bovenkaak



aanbevolen dosering onderkaak



2. Altijd voor-roeren! Dit vereenvoudigt het reinigen en is ook voor het behoud van het apparaat.

3. Deksel erop en in de Cavex Alginate Mixer plaatsen

4. Cavex Alginate Mixer sluiten en op start drukken

5. Neem in één beweging het alginat uit het bakje en breng deze aan in de lepel.

### Onderhoud/reiniging Cavex Alginate Mixer:

1. Los een weinig Cavex GreenClean alginat-remover op in een bak water.
2. Met een in Cavex GreenClean-oplossing bevochtigde (niet natte!) tissue en het roerstaafje is het apparaat eenvoudig te reinigen.
3. Voorkom dat de Cavex Alginate Mixer vuil wordt. Er kan dan minder restmateriaal in het apparaat komen.

