



Protocol voor het maken van een bleeklepel



① Draai het verwarmelement naar achteren en open het frame.



⑤ De Bleach dieptrekplaat zal nu opwarmen en langzaam doorzakken (zie TIP1). Zorg dat de gipsafdruk in het midden van de vacuümplaat ligt (plaat met gaatjes).



② Zet de timer op circa 3 minuten. Laat het apparaat 2 minuten voorverwarmen. Het "HEATING" lampje brandt nu.



⑥ Als de plaat circa 3cm. is gezakt de drukknop op stand "Vacuüm" (=) zetten en het frame geheel naar beneden trekken.



③ Plaats de "Bleach" dieptrekplaat in het frame. Sluit het frame en draai de zwarte knop stevig aan. Schuif het frame vervolgens geheel omhoog.



⑦ Draai het verwarmelement weer naar achteren en laat de vacuüm-motor circa 40 seconden lopen. Na het uitschakelen van de vacuüm-motor nog 2 minuten wachten alvorens het frame te openen.




④ Draai het voorverwarmde (duidelijk gloeiend) verwarmelement boven het frame.



⑧ Knip de lepel uit en werk het netjes af (zie TIP2). Voorkom scherpe randen.

TIP1. Men kan er ook voor kiezen om in de lepel kleine reservoirs uit te blokken. Dit vermindert de kans op eventuele gevoeligheid na het bleken.

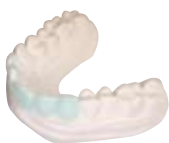

Breng met flowable composiet of speciaal block-out materiaal een dun laagje aan op de te bleken elementen en hard uit met lamp.

TIP2. Het afwerken van de lepel kan het best worden gedaan met zogenaamde afwerkschijfjes.

