



Protocol voor het maken van een Mouth protector



① Draai het verwarmelement naar achteren en open het frame.



⑤ De plaat zal nu opwarmen en langzaam doorzakken.



② Plaats de "Mouth protector" dieptrekplaat, met de transparante kant naar boven, in het frame. Sluit het frame en draai de zwarte knop stevig aan.



⑥ Als de plaat circa 3cm. is gezakt de drukknop op stand "Vacuüm" (=) zetten en het frame geheel naar beneden trekken.



③ Schuif het frame helemaal naar boven. Draai verwarmelement boven het frame.



⑦ Draai het verwarmelement weer naar achteren en laat de vacuüm-motor circa 40 seconden lopen. Na het uitschakelen van de vacuüm-motor nog 2 minuten wachten alvorens het frame te openen.



④ Zet de timer op 5 minuten. Begin nu pas met verwarmen. Het is zeer belangrijk dat deze plaat langzaam opwarmt.



⑧ Knip de mouth protector uit (zie TIP1) en werk het netjes af (zie TIP2). Voorkom scherpe randen.

TIP1. Voor meer comfort kan de mouth protector ook worden ingekort. Snij de protector door, halverwege de 1e molaar.



TIP2. Het afwerken van de lepel kan het best worden gedaan met een gasbrander (blauwe vlam) of met zogenaamde afwerkschijfjes.

