

Cavex Bite&White

thuis bleeksystemen



**BELANGRIJKE INFORMATIE
M.B.T. UW BLEEKBEHANDELING
Z.O.Z.!**

CAVEX

Bite&White



Professional Dental Whitening System

www.cavex.nl

Cavex Bite&White thuis bleeksystemen

Gefeliciteerd met de aankoop van het Cavex Bite&White Thuisbleeksysteem.

Graag willen wij u nog op het volgende attenderen:

- 1. Het beste tijdstip om uw tanden te bleken is in de avond, bij voorkeur niet te lang voor het slapen gaan.** Reden hiervoor is dat u dan niet meer eet of drinkt en tijdens het slapen kunnen uw tanden weer “herstellen” van de bleekbehandeling.
- 2. Vermijd roken en sterke kleurstoffen gedurende de bleekperiode.** Denk hierbij aan koffie, thee, rode wijn, cola, kerrie, kurkuma, spinazie etc. De stelregel is dat als een etenswaar een vlek in een wit tafellaken kan maken, dan kan dat ook met uw tanden. Eet en drink vooral “witte” en neutrale waren. 24 Uur na de bleekbehandeling kunt u weer normaal eten/drinken.
- 3. Voorkom overdosering van de bleekgel.** Indien u de bleekgel zelf in de lepel dient aan te brengen, doe dit dan met een druppel per element (tand) en voorkom overdosering. Een grotere hoeveelheid bleekgel versnelt het bleekproces niet en kan irritatie aan uw tandvlees veroorzaken.
- 4. Wat te doen bij gevoeligheid van de tanden tijdens of na het bleken?** Soms treed er gevoeligheid van de tanden op tijdens of na het bleken. Dit is van tijdelijke aard maar kan als hinderlijk ervaren worden. Om deze gevoeligheid te verlichten kunt u gebruiken maken van Cavex Bite&White ExSense en een “sensitive” tandpasta gebruiken bij het poetsen.
- 5. Vragen over bleken?** Voor vragen m.b.t. tot uw situatie en eventuele klachten dient u contact op te nemen met uw tandarts. Voor vragen over de bleekproducten kunt u contact opnemen met Cavex Holland BV; www.cavex.nl / dental@cavex.nl / +31 (0)23 530 7700.

