

PROTOKOLL

HERSTELLUNG EINER BLEACHING-SCHIENE



1 Drehen Sie das Heizelement nach hinten. Platzieren Sie den Rahmen, der die Platte hält, leicht oberhalb des Teils mit den Löchern.



5 Platzieren Sie das Zahnmodell mittig auf dem Teil mit den Löchern. Die Bleach-Tiefziehplatte wird erhitzt und sinkt langsam ab. Achten Sie darauf, dass das Zahnmodell mittig auf der Vakuumplatte mit Löchern liegt.



2 Entfernen Sie die blaue Folie von der Bleach-Tiefziehplatte und setzen Sie sie anschließend in den Rahmen ein.



6 Wenn die Platte etwa 1,5 bis 2 cm absinkt:
- Stellen Sie den Druckknopf auf 'VACUUM'
- Schieben Sie den Rahmen mit den beiden Griffen nach unten
- Drehen Sie das Heizelement nach hinten



3 Schließen Sie den Rahmen und ziehen Sie den schwarzen Knopf fest. Schieben Sie den Rahmen dann ganz nach oben, bis er das graue Teil berührt. Drehen Sie das Heizelement über den Rahmen.



7 Lassen Sie das Gerät 30 Sekunden tiefziehen, schalten Sie dann die Vakuumpumpe aus und lassen Sie es etwa 2 Minuten abkühlen. Lösen Sie anschließend den Rahmen und entnehmen Sie vorsichtig die Platte mit dem Zahnmodell.



4 Stellen Sie den Druckknopf auf die Position 'HEATING' und drehen Sie den Timer kräftig. Die Lampe darüber leuchtet auf. Stellen Sie den Timer auf mehr als 4 Minuten.



8 Schneiden Sie die Bleaching-Schiene etwa einen halben Zentimeter oberhalb des Zahnfleischrandes aus und halten Sie den Rand über die gesamte Länge kurz bei den hinteren Molaren. Bearbeiten Sie die Ränder mit Polierscheiben (siehe TIPP 2).

TIPP 1. Bei großen Zwischenräumen oder Unterschnitten diese vorher mit Cavex Barrier/Spacer ausblocken. Tragen Sie eine dünne Schicht Cavex Barrier/Spacer bis einen Millimeter unterhalb des Zahnfleischrandes auf und polymerisieren Sie diese.



TIPP 2. Die Nachbearbeitung der Schiene erfolgt am besten mit sogenannten Lisko-S-Scheiben von Erkodent oder Brushes.

TIPP 3. Tragen Sie eine Isolierflüssigkeit, wie z. B. Aislar, auf das Zahnmodell auf. So bleibt die Bleaching-Schiene nach dem Tiefziehen schön klar.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX