

PROTOCOL

HET MAKEN VAN EEN BLEEKLEPEL



1 Draai het verwarmelement naar achteren. Plaats het frame waar de plaat in gaat een klein stukje boven het onderdeel met de gaatjes.



5 Zet het tandboogmodel midden op het deel met de gaatjes. De Bleach dieptrekplaat zal opwarmen en langzaam doorzakken. Zorg dat het tandboogmodel in het midden op de vacuümplaat met gaatjes ligt.



2 Verwijder de blauwe folie van de Bleach dieptrekplaat en plaats deze daarna in het frame.



6 Wanneer de plaat ongeveer 1,5 tot 2 cm doorzakt:
- zet de drukknop op stand 'VACUUM'
- schuif het frame met de twee handvaten naar beneden
- draai het verwarmelement naar achteren



3 Sluit het frame en draai de zwarte knop aan. Schuif het frame vervolgens geheel omhoog tot tegen het grijze deel. Draai het verwarmingselement boven het frame.



7 Laat het apparaat 30 seconden dieptrekken, daarna de vacuümpomp uitzetten en ongeveer 2 minuten afkoelen. Draai daarna het frame los haal de plaat met tandboogmodel er voorzichtig uit.



4 Zet de drukknop omhoog op stand 'HEATING' en geef de timer een flinke draai. Het lampje erboven gaat aan. Draai de timer op meer dan 4 minuten.




8 Knip de bleeklepel uit tot een halve cm boven de tandvleesrand en over de hele lepellengte houdt de rand kort bij de achterste molaren. Werk de randen af met afwerkschijfjes (zie TIP 2).

TIP 1. Wanneer er grote ruimten of ondersnijdingen zijn, deze tevoren uitblokken met Cavex Barrier/Spacer. Breng met de Cavex Barrier/Spacer een dun laagje aan tot een millimeter onder de tandvleesrand en polymiseer deze.



TIP 2. Het afwerken van de lepel kan het best worden gedaan met zogenaamde Lisko-S schijfjes van Erkodont of Brushes.

TIP 3. Breng isolatievloeistof van bijvoorbeeld Aislar aan op het tandboogmodel. Zo blijft de bleeklepel mooi helder na dieptrekken.

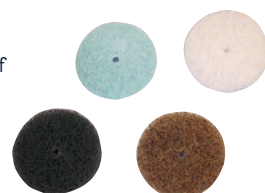

YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY