

# PROTOCOL

## HET MAKEN VAN EEN MONDBESCHERMER



1 Draai het verwarmelement naar achteren. Laat het frame waar de plaat in gaat een klein stukje boven het onderdeel met de gaatjes.



5 Zet het tandboogmodel midden op het deel met de gaatjes. De Mouth protector dieptrekplaat zal opwarmen en langzaam doorzakken. Zorg dat het tandboogmodel in het midden op de vacuümplaat met gaatjes ligt.



2 Plaats de Mouth protector dieptrekplaat, met de transparante kant naar boven, in het frame.



6 Wanneer de plaat ongeveer 1,5 tot 2 cm doorzakt:  
- zet de drukknop op stand 'VACUUM'  
- schuif het frame met de twee handvaten naar beneden  
- draai het verwarmelement naar achteren



3 Sluit het frame en draai de zwarte knop aan. Schuif het frame vervolgens geheel omhoog tot tegen het grijze deel. Draai het verwarmingselement boven het frame.



7 Laat het apparaat 60 seconden dieptrekken, daarna uitzetten en ongeveer 2-3 minuten afkoelen tot deze niet meer plakkerig aanvoelt. Draai daarna het frame los haal de plaat met tandboogmodel er voorzichtig uit.



4 Zet de drukknop omhoog op stand 'HEATING' en geef de timer een flinke draai. Het lampje erboven gaat aan. Draai de timer op meer dan 4 minuten.




8 Knip de mondbeschermer uit (zie TIP 1) en werk het netjes af (zie TIP 2). Voorkom scherpe randen.

**TIP 1.** Voor meer comfort de mondbeschermer afkorten tot halverwege de 1e molaar. Dit geeft meer comfort voor de patiënt.



**TIP 2.** Het afwerken van de lepel kan het best worden gedaan met zogenaamde Lisko-S schijfjes van Erkodont of Brushes. Daarna terugplaatsen op het tandboogmodel en met een brandertje voorzichtig de randen glad maken en het model glanzend. Op het model laten tot dit is afgekoeld.

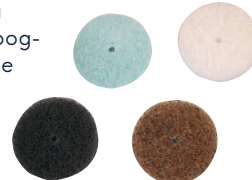

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

ZV903NL.01