

# PROTOCOLE

## LA FABRICATION D'UNE GOUTTIÈRE DENTAIRE



1 Tournez l'élément chauffant vers l'arrière. Placez le cadre où la plaque sera insérée légèrement au-dessus de la partie avec les trous.




2 Retirez le film bleu de la plaque thermoformable pour gouttière et placez-la ensuite dans le cadre.



3 Fermez le cadre et serrez le bouton noir. Faites ensuite glisser le cadre complètement vers le haut jusqu'à ce qu'il touche la partie grise. Tournez l'élément chauffant au-dessus du cadre.



4 Mettez le bouton de pression en position 'HEATING' et donnez une bonne rotation à la minuterie. Le voyant au-dessus s'allume. Réglez la minuterie sur plus de 4 minutes.

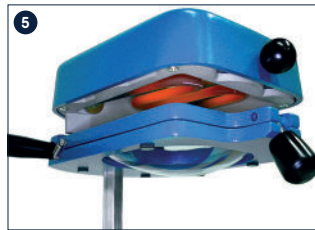

5 Placez le modèle de l'arc dentaire au centre de la partie avec les trous. La plaque thermoformable pour gouttière va chauffer et s'affaisser lentement. Assurez-vous que le modèle de l'arc dentaire est bien centré sur la plaque à vide avec trous.



6 Lorsque la plaque s'affaisse d'environ 1,5 à 2 cm :  
- mettez le bouton de pression en position 'VACUUM'  
- faites glisser le cadre vers le bas en utilisant les deux poignées  
- tournez l'élément chauffant vers l'arrière



7 Laissez l'appareil thermoformer pendant 30 secondes, puis éteignez-le et laissez refroidir pendant environ 1 minute. Desserrez ensuite le cadre et retirez délicatement la plaque avec le modèle de l'arc dentaire.




8 Après le thermoformage, découpez grossièrement la plaque autour du modèle de l'arc dentaire. Retirez délicatement la gouttière et découpez-la avec de petits ciseaux près du bord des dents ; laissez la marge gingivale libre. Finissez les bords avec des disques de finition (voir CONSEIL 2).

**CONSEIL 1.** La plaque thermoformable pour gouttière est un stratifié dur et donc plus difficile à retirer de l'empreinte en plâtre. Pour cette raison, il est important de bloquer les contre-dépouilles et les espaces au préalable avec Cavex Bite&White Barrier/Spacer.



**CONSEIL 2.** La finition de la gouttière se fait de préférence avec des disques Lisko-S d'Erkodent ou des brosses.

**CONSEIL 3.** Appliquez un liquide isolant, par exemple Aislar, sur le modèle de l'arc dentaire. Ainsi, la gouttière reste bien transparente après le thermoformage.

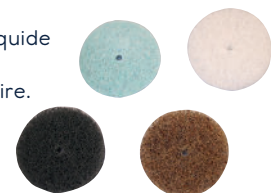

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX