


PROTOCOL

HET MAKEN VAN EEN SPLINT



1 Draai het verwarmelement naar achteren. Laat het frame waar de plaat in gaat een klein stukje boven het onderdeel met de gaatjes.

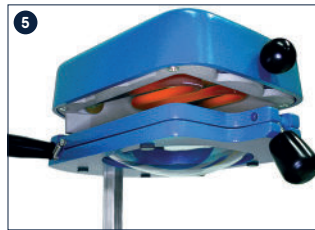

5 Zet het tandboogmodel midden op het deel met de gaatjes. De Splint dieptrekplaat zal opwarmen en langzaam doorzakken. Zorg dat het tandboogmodel in het midden op de vacuümplaat met gaatjes ligt.



2 Verwijder de blauwe folie van de Splint dieptrekplaat en plaats deze daarna in het frame.



6 Wanneer de plaat ongeveer 1,5 tot 2 cm door zakt:
- zet de drukknoop op stand "VACUUM"
- schuif het frame met de twee handvaten naar beneden
- draai het verwarmelement naar achteren



3 Sluit het frame en draai de zwarte knop aan. Schuif het frame vervolgens geheel omhoog tot tegen het grijze deel. Draai het verwarmingselement boven het frame.



7 Laat het apparaat 30 seconden dieptrekken, daarna uitzetten en ongeveer 1 minuut afkoelen. Draai daarna het frame los haal de plaat met tandboogmodel er voorzichtig uit.



4 Zet de drukknoop omhoog op stand "HEATING" en geef de timer een flinke draai. Het lampje erboven gaat aan. Draai de timer op meer dan 4 minuten.



8 Na het dieptrekken de plaat kort rond het tandboogmodel afknippen. Haal voorzichtig de splint los en knip de splint met een kleine schaar kort af tot de rand van de elementen; laat de tandvleesrand vrij. Werk de randen af met afwerkschijfjes (zie TIP 2).

TIP 1. De splint dieptrekplaat is een harde laminaat en hierdoor lastiger van de gipsafdruk te krijgen. Om die reden is het belangrijk het tandboogmodel tevoren goed uit te blokken bij ondersnijdingen en ruimten met de Cavex Bite&White Barrier/Spacer.



TIP 2. Het afwerken van de lepel kan het best worden gedaan met zogenaamde Lisko-S schijfjes van Erkodent of Brushes.

TIP 3. Breng isolatievloeistof van bijvoorbeeld Aislar aan op het tandboogmodel. Zo blijft de splint mooi helder na dieptrekken.



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY