

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

# CAVEX ALGINATE ADHESIVE

Betere afdrukken, minder vervorming.

- Verbetert zowel mechanische als chemische verbinding tussen afdruklepel en alginaat
- Betere afdrukwaliteit door verminderde vervorming wanneer de afdruklepel wordt verwijderd uit de mond
- Geschikt voor metalen en kunststof afdruklepels
- Zeer gemakkelijk aan te brengen met het kwastje
- Geen speciale ventilatiemaatregelen nodig
- Minimaal 50 applicaties per flesje
- Residue eenvoudig te verwijderen met isopropyl alcohol of ethanol (95%)



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY


CAVEX

# PREMIUM ALGINATE SYSTEM

## CAVEX ALGINATE ADHESIVE

### Gebruiksaanwijzing:

1. Breng een dun laagje adhesief aan op de afdruklepel.  
Wacht 3 tot 5 minuten.
2. Alginaat aanbrengen.
3. Neem afdruk zoals gebruikelijk.
4. Verwijder alginaatresten met Cavex GreenClean.
5. Verwijder residu adhesief in afdruklepel met isopropyl alcohol of ethanol (95%).

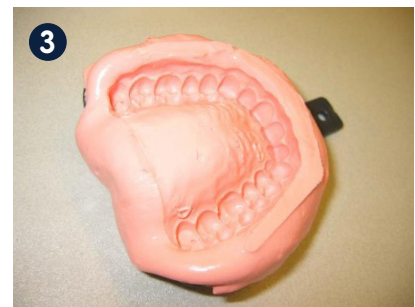

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX

ZYA150.01