

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX INSTANT STONE

-
Een perfect gipsmodel
in slechts 15 minuten



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

CAVEX INSTANT STONE

EFFICIËNT GIPSMODELLEREN ZONDER TECHNIEKRUIMTE

Veel tandartspraktijken beschikken niet over een aparte techniekruimte en hebben zelden een gips- of vacuümenger. Dit maakt het mengen van gips vaak tot een tijdrovende en omslachtige handeling.

Cavex Instant Stone biedt hiervoor de ideale oplossing. Dit innovatieve gipssysteem maakt het mogelijk om binnen slechts 15 minuten een perfect model te vervaardigen, geschikt voor onder andere bleeklepels, splints en mondbeschermers. Behandelingen die normaal meerdere afspraken vereisen, kunnen zo in één zitting worden afgerond.

Cavex Instant Stone verhoogt de efficiëntie van de praktijk en verbetert tegelijkertijd de service naar de patiënt. De uitgeharde modellen zijn uitzonderlijk sterk, voelen aan als kunststof en hebben een glad, slijtvast oppervlak.

Dankzij het slimme mengsysteem is Cavex Instant Stone eenvoudig en schoon in gebruik. Bovendien kunnen modellen volledig luchtbelvrij worden gegoten, zonder gebruik van een triltafel.

Kenmerken

- Strak en glad
- Snel en schoon
- Accuraat en efficiënt

Assortiment:

VT012 4 x 20 (Instant Stone + Activator)

Gebruiksaanwijzing:

1. Schud het gips eerst goed los.
2. Open het deksel, voeg de activator toe en sluit het deksel.
3. Plaats de duim op het deksel en schud het bakje krachtig gedurende 15 tot 30 sec.
4. Giet eerst een klein laagje gips rechtstreeks uit het bakje in de afdruk.
5. Verdeel het gips gelijkmatig over de afdruk. (Zorg ervoor dat het gips goed in de gehele afdruk loopt. Om dit te bevorderen kunt u met de afdruk zachtjes op tafel tikken.)
6. Giet vervolgens de gehele afdruk vol.
7. Na 8 tot 12 minuten is het model voldoende uitgehard om uit de afdruk te halen.
8. Snijd de randen weg met een scherp mes.

Uw gipafdruk is klaar!



YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nederland | cavex.nl

CAVEX