

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA BITE

-
Perfekt beim ersten Mal,
jedes Mal!



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM IMPRESSION MATERIALS

CAVEX SILICONA BITE

Ein gutes Bissregistrat sollte komfortabel und einfach zu handhaben sein. Idealerweise sollte es bereits beim ersten Versuch eine perfekte Bissregistrierung ermöglichen. Dies ist nur möglich, wenn das Material benutzerfreundlich, einfach zu handhaben und 100 % präzise ist.

Cavex SiliconA Bite erfüllt alle wichtigen Kriterien für ein ideales Bissregistrat. Es bietet eine sehr kurze Verarbeitungs- und Abbindezeit von jeweils nur 30 Sekunden. Darüber hinaus ist es hochgefüllt und erreicht eine Härte von Shore D 40 (vergleichbar mit Shore A >94). Dank dieser idealen Kombination von Eigenschaften und seiner hervorragenden Thixotropie gewährleistet Cavex SiliconA Bite eine perfekte Bissregistrierung.

Die hohe Härte (Shore D 40) garantiert eine äußerst präzise und dauerhaft präzise Okklusion. Cavex SiliconA Bite lässt sich leicht trimmen und schleifen und ist daher für Zahntechniker besonders komfortabel in der Handhabung.

Sortiment:

AS54 Cavex SiliconA bite 2 x 50 ml Kartuschen

Dank der kurzen Verarbeitungs- und Abbindezeit beträgt die gesamte Behandlungszeit für eine Bissregistrierung nur eine Minute. Dies erhöht den Patientenkomfort deutlich und minimiert das Risiko von Ungenauigkeiten durch die schnelle Stabilisierung.

Ein wesentlicher Schritt des Verfahrens ist das Auftragen des Materials auf die Zähne. Dank spezieller Applikatoren wird eine gleichmäßige und homogene Schicht Cavex SiliconA Bite auf die Bissfläche aufgetragen. Die thixotropen Eigenschaften sorgen dafür, dass das Material genau dort bleibt, wo es platziert wird.

Cavex SiliconA Bite fließt leicht aus der Kartusche, bleibt aber sofort nach dem Auftragen stabil. Dadurch wird sichergestellt, dass die Bissfläche vollständig bedeckt ist und sich das Material gleichmäßig verteilt.


Cavex SiliconA Bite enthält Füllstoffe mit hohem Reflexionsvermögen, wodurch das Material für CAD/CAM-Anwendungen gut scanbar ist.

Für weitere Informationen:

Telefon: +49 (0)4931 9809682

Website: www.cavex.nl

- Eigenschaften**
- **Überragende Härte**
 - **Schnell**
 - **Hochthixotrop**
 - **Scanbar**
 - **Einzigartige Applikatoren**

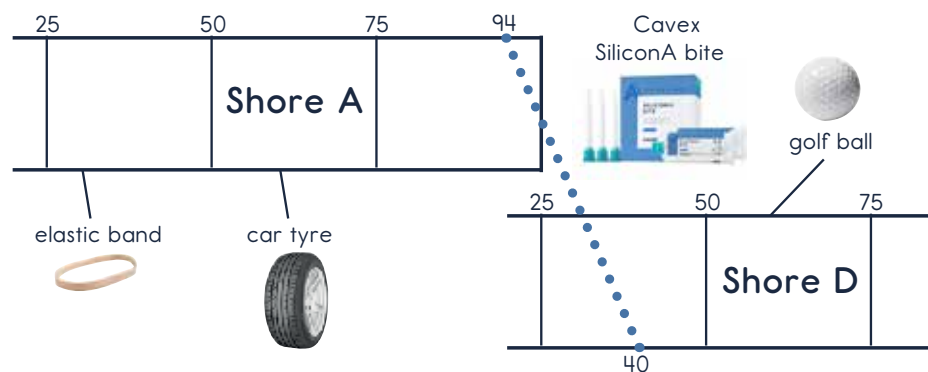

YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Die Niederlande | cavex.nl

CAVEX

ZYA75D.01