

Een perfecte afdruk is geen toeval

Cavex Alginate Mixer 3

Productoverzicht

AT540	Cavex Alginate Mixer 3 incl. 10 x 500 g Cavex Cream Alginate NS
AT541	Cavex Alginate Mixer 3 incl. 10 x 500 g Cavex CA37 NS
AT542	Cavex Alginate Mixer 3 incl. 10 x 500 g Cavex Impressional NS
AT543	Cavex Alginate Mixer 3 incl. 10 x 500 g Cavex ColorChange
AT544	Cavex Alginate Mixer 3 incl. 10 x 500 g Cavex Orthotracc

Cavex adviseert Normal Set alginaten voor gebruik in de Cavex Alginate Mixer. Het apparaat mixt zeer intensief, waardoor de reactiesnelheid van de componenten hoger zal zijn. Het gebruik van Fast Set kan resulteren in een te korte verwerkingstijd.

Accessoires

AT240 AT260	Cavex Alginate Container incl. doseerschepje. Voor alginaat in perfecte conditie en exacte dosering.
AT550	Mengbeker voor de Cavex Alginate Mixer 3. Voor een perfecte alginaat mix.
AT511	Spatel. Om het alginaat in één beweging uit de mengbeker te halen.
AT513	Roerstokje. Voor het kort voorroeren van het alginaat en water.
AT076	Doseerschepje en waterbekertje. Met vier maatstreepjes, geschikt voor orthodontie.
AT021	Cavex waterdoseerflacon. Voor exacte dosering van water.
HA001	Cavex GreenClean. pH neutaal, reinigt trays, spatels en instrumenten.
AT001	Cavex ScanSpray. Voor 100% betrouwbare digitale scans van alginaatafdrukken.
HA053	Cavex ImpreSafe. Voor desinfectie van alginaatafdrukken.



Het beste dat een pak alginaat kan overkomen



Modelwijzigingen voorbehouden

Cavex alginaten en accessoires worden geleverd door uw dental depot. Voor meer informatie over productsamenstelling en -toepassingen kunt u contact opnemen met Cavex Holland BV.

Van minuten naar seconden.

Naast een constante kwaliteit biedt de Cavex Alginate Mixer 3 ook een significante tijdswinst. Voorbereiding, verwerking en reiniging is een kwestie van seconden. De gewonnen tijd kan uitstekend op een andere manier benut worden.

Eenvoudige en intuïtieve bediening.

Alginaat mixen moet makkelijk zijn, dus de Cavex Alginate Mixer 3 is dat ook. Op het overzichtelijke touch-screen kiest u één van de vier voorgeprogrammeerde programma's, desgewenst past u de mixtijd aan en start u het programma. Eenvoudiger kan niet!

- Programma M1: Extra Fast Set algiinaat
- Programma M2: Fast Set algiinaat
- Programma M3: Normal Set algiinaat
- Programma M4: Gips



Opgeruimd werken.

De Cavex Alginate Mixer 3 wordt geleverd met bijbehorende accessoires die netjes opgeruimd kunnen worden in de magnetische accessoirehouder. Rondslingerende spatels, mengnappen en andere materialen behoren tot het verleden. De Cavex Alginate Mixer 3 kan overal staan op slechts 22x28 cm, staat ook tijdens het mixen stabiel, en is met het moderne design een aanwinst voor iedere praktijk.

Zo'n mooie, homogene algiinaat mix zag u nog nooit

De basis van een goede algiinaatafdruk ligt in de keuze voor het beste algiinaat en de juiste verwerking ervan. Cavex is toonaangevend fabrikant van alginaten en biedt een breed assortiment aan producten om de perfecte algiinaatafdruk te kunnen maken. De Cavex Alginate Mixer 3 is het ideale apparaat om een perfecte homogene algiinaat mix en uiteindelijk de perfecte algiinaatafdruk te maken.

De Cavex Alginate Mixer 3 is voorzien van een 12 volt motor. Daardoor kunnen de versnelling en vertraging nauwkeurig gestuurd worden en is de manier waarop energie in het algiinaat wordt gebracht volledig onder controle. Afhankelijk van het gekozen programma maakt de Cavex Alginate Mixer 3 eerst enkele links-rechts bewegingen om vervolgens geleidelijk de snelheid op te voeren. Na enkele seconden mixen wordt de snelheid weer geleidelijk omlaag gebracht. Al met al wordt de energie dus zeer gecontroleerd in het algiinaat gebracht, resulterend in een perfect gemixt algiinaat in slechts zes tot acht seconden.



Manueel gemixt



Cavex Alginate Mixer 3

Altijd zeker van een perfecte afdruk.

Reproduceerbaarheid is een vereiste in moderne tandheelkunde. Met de hand gemixt algiinaat levert variaties in het product op. Hoe lang wordt er gemixt, hoe intensief, en met welke techniek? Allemaal factoren die invloed hebben op de kwaliteit en uithardingstijd. De Cavex Alginate Mixer 3 mixt altijd op exact dezelfde manier, dus de eigenschappen van het gemixte algiinaat zijn altijd perfect voorspelbaar.

Maximale kwaliteit, minimaal onderhoud.

Het roterende binnenwerk is van kunststof. Daardoor is de mixer stiller, zijn smering en onderhoud niet nodig en is de levensduur langer dan bij een metalen binnenwerk. Het deksel heeft een beveiliging waardoor de machine nooit gestart kan worden met open deksel. De behuizing is gemaakt van duurzaam materiaal dat bestand is tegen gangbare reinigingsmiddelen (niet op alcoholbasis).

Cavex Alginate Mixer Club.

Bij het registreren van uw nieuwe Cavex Alginate Mixer 3 kunt u er voor kiezen lid te worden van de CAM-club en te profiteren van doorlopende voordelen, exclusief voor CAM-club leden.



Technische specificaties Alginate Mixer

Voltage	AC 220 – 230 V, 50/60 Hz
Vermogen	430 W
Toerental	Max. 3.600 rpm
Timer	Per seconde instelbaar 1 – 20 sec
Geheugenplaatsen	Vier voorgeprogrammeerde programma's, tijdsduur aan te passen.
Afmetingen (b x d x h)	219 x 273 x 309 mm
Gewicht	16,8 kg

Cavex Alginate Mixer 3 Protocol




1. Doe de juiste dosering algiinaat en water in de mengbeker.



2. Roer kort voor om de mengbeker makkelijker te kunnen reinigen en ter behoud van de mixer.



3. Sluit de mengbeker goed door het deksel, met de klok mee, dicht te draaien.

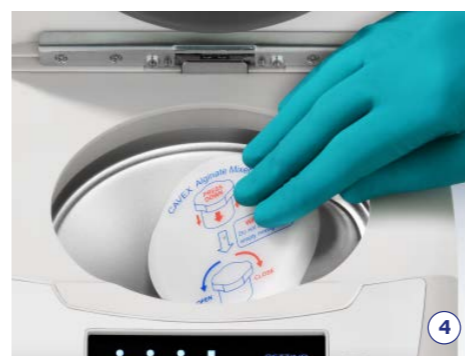

4. Plaats de mengbeker in de mixer en sluit het deksel.



5. Kies het programma, druk op start en wacht tot het programma is afgerond.



6. Haal de algiinaat mix in één beweging uit de mengbeker en breng het aan in de afdruklepel.