

Cavex Boil&Bite

ONE BITE FITS ALL

Revolutionair

Deze *thermoplastische tray* is een **boven- en ondertray** in één en inzetbaar voor verschillende doeleinden.

Deze revolutionaire tray wordt goed in de mond verdragen en is geschikt voor iedereen!

Zeer eenvoudig

De tandarts of de patiënt kan de Cavex Boil&Bite zelf maken

1. Breng water aan de kook.
2. Plaats de Cavex Boil&Bite in een geschikt (hittebestendig) glas.
3. Voeg voldoende water aan de Cavex Boil&Bite toe, zodat de tray - met uitzondering van de handgreep - is ondergedompeld. Laat het geheel 1 minuut in het water staan.
4. Haal de Cavex Boil&Bite voorzichtig uit het water.
5. Overtollig water afschudden.
6. Plaats de Cavex Boil&Bite meteen in de mond en pas de vorm van de tray aan door deze met je vingers goed tegen de tanden te drukken. Doe dit voor boven en onder.



Multi-Inzetbaar

Deze custom made tray is zeer goed inzetbaar voor meerdere doeleinden:

- **Whitening behandelingen**
- **Fluorbehandelingen**
- **Tandgevoeligheid**

Door de afdruk van het gebit in de tray blijven de verschillende gels goed zitten. Hierdoor kan er met Cavex Bite&White worden gebleekt, waarna met Cavex Bite&White ExSense de tanden weer effectief worden **geconditioneerd en desensibiliseerd**.

8 Bitjes in 1 doos



■ **Cavex Holland BV**
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Nederland

T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl