



Les matériaux pour laboratoires de Cavex sont le prolongement du cabinet dentaire et doivent répondre à de sévères exigences de qualité. De plus, grâce à l'étroite collaboration de Cavex avec les techniciens et les prothésistes dentaires, ces produits répondent aux besoins spécifiques du laboratoire de technique dentaire. Your impression is our concern

La cire à modeler avec laquelle vous pouvez lire et écrire.

La réalisation d'un modèle de prothèse est un art. Elle est le résultat du talent et de l'habileté du technicien dentaire, de la collaboration avec le dentiste et des propriétés exceptionnelles de la cire à modeler.

Le technicien dentaire exige beaucoup d'une cire.

Cavex Set Up Modelling Wax répond certainement à toutes ses demandes.



Le comportement de Cavex Set Up Soft, Regular, Hard et Extra Hard Modelling Wax est prévisible.

- pour prothèses partielles et complètes

- rétraction minimale dimensionnement stable

- plastique et élastique

- cire à modeler et boxing wax en même temps

Le secret d'une bonne cire à modeler se trouve dans sa composition. Des paraffines, des micro-cires, de la cire naturelle et des pigments sont combinés de telle sorte par Cavex que les températures de fusion ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. De cette façon, les processus de fusion et de durcissement se déroulent d'une façon régulière et prévisible. Comme les circonstances et les préférences personnelles peuvent différer, vous avez le choix entre Soft, Regular, Hard et Extra Hard. La manipulation reste la même, seuls les points de fusion et la dureté finale varient.

Les plaques de cire ont un format royal, souvent suffisant pour réaliser deux prothèses. En plus de l'utilisation comme cire d'occlusion, Cavex Set Up Modelling Wax peut également être utilisée comme boxing wax, parce qu'elle adhère bien à la plaque-base. Chez les dentistes, cette cire est très populaire pour les enregistrements d'occlusion, grâce à sa consistance idéale.

Une prothèse doit non seulement être belle, mais doit également s'adapter parfaitement.

L'esthétique et la perfection technique doivent aller de pair. La cire reste suffisamment longtemps plastique dans les mains du technicien pour pouvoir réaliser un beau modelage et encore corriger les éléments. Elle garde de plus sa stabilité dimensionnelle. Son élasticité rend cette cire particulièrement appropriée pour la réalisation de prothèses partielles.

Cavex Set Up Modelling Wax se finit avec un poli parfait, sans formation de gouttes. La teinte est très naturelle, ce qui va plaire aussi bien au praticien qu'au patient lors de l'essai. Cela vaut aussi pour la fermeté en bouche. Après durcissement, les dents sont solidement fixées. Le résultat final sera exactement identique au modèle.

Cavex Set Up Soft, Cavex Set Up Regular, Cavex Set Up Hard et Cavex Set Up Extra Hard sont livrés par votre dépôt en emballages de 500 grammes (23 plaques) et en emballages de 2,5 kg (115 plaques). Pour des informations supplémentaires sur la composition des produits et les indications, vous pouvez contacter Cavex, +31 23 530 77 00 - ou sur le site www.cavex.nl

