

Quadrant FiniSense: Prévention des sensibilités

- lors de douleurs causées par une dentine exposée
- prévention et atténuation des douleurs post-opératoires après préparation de couronnes et d'inlays


Pourquoi Quadrant FiniSense?

- efficace en 30 secondes
- actif pendant 12 mois ou plus
- ne laisse pas de film sur la surface après application
- facile d'emploi
- 150 applications par flacon



Comment l'utiliser ?

⇒ une obturation intradentinaire immédiate prévient les flux liquidiens dans les tubuli.

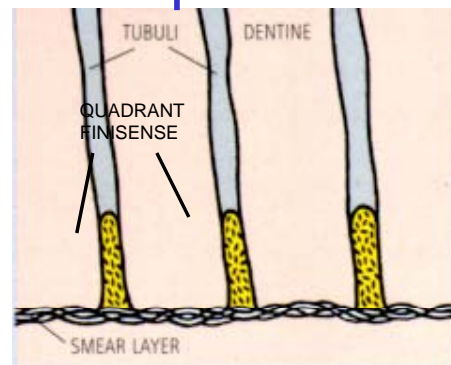


Résultat:

Prévention/atténuation de la sensibilité dentinaire

Quadrant FiniSense


Prévention des sensibilités

- lors de douleurs causées par une dentine exposée
- prévention et atténuation des douleurs post-opératoires après préparation de couronnes et d'inlays

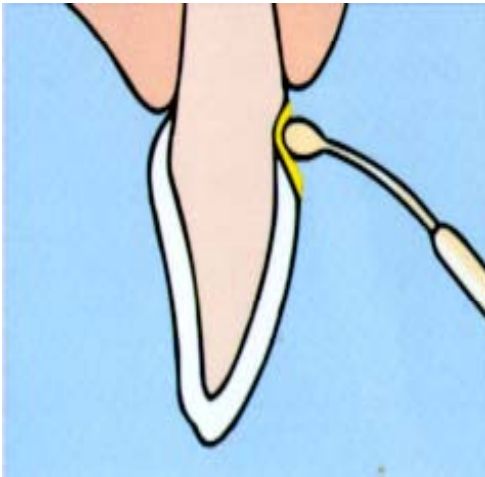

Pour une diminution immédiate de la sensibilité

- Nettoyage de la dentine avec par exemple de la pierre ponce
- Sécher prudemment la surface dentinaire
- Appliquer le Quadrant FiniSense et laisser agir 30 secondes
- Sécher tout doucement à l'air
- Rincer abondamment à l'eau

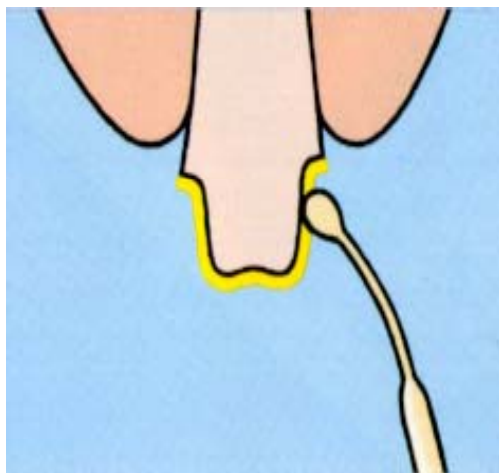

Pour la prévention de la sensibilité post-opératoire

- Sécher prudemment la surface dentinaire
- Appliquer le Quadrant FiniSense et laisser agir 30 secondes
- Sécher tout doucement à l'air
- Rincer abondamment avec de l'eau