

Quadrant FiniSense: Per prevenire l'ipersensibilità

- In caso di sensibilità al colletto
- Prevenzione e terapia del dolore post-operatorio


Perché Quadrant FiniSense

- agisce in 30 sec.
- efficace per 12 mesi ed oltre
- non lascia pellicola sulla superficie
- facile da usare
- 150 applicazioni per flacone



Come agisce?

⇒ Sigilla rapidamente i tubuli dentinali bloccando il movimento osmotico dei liquidi.

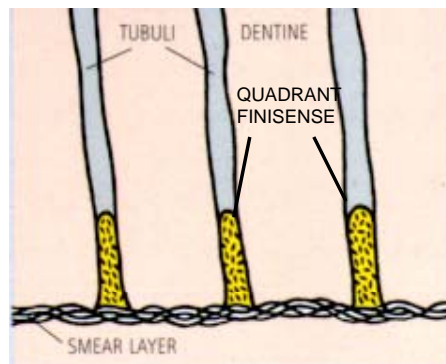


Risultato:

Prevenzione dell'ipersensibilità


Quadrant FiniSense Primer Desensibilizzante

- In caso di sensibilità al colletto
- Prevenzione e terapia del dolore post-operatorio

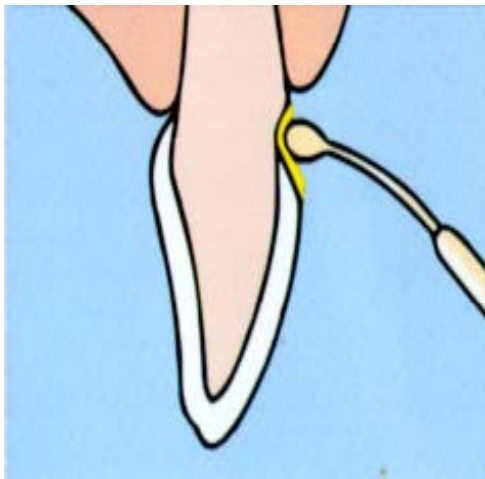

In caso di sensibilità al colletto:

- Pulire la zona (es. con della pomice)
- Asciugare con cura la superficie
- Applicare Quadrant FiniSense e lasciarlo agire per 30 sec.
- Asciugare delicatamente
- Risciacquare accuratamente

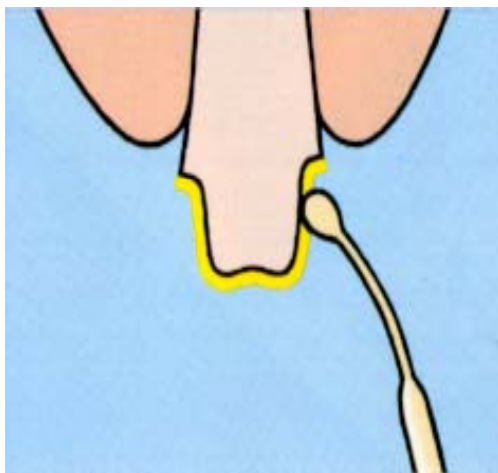

Prevenzione e terapia del dolore post-operatorio

- Asciugare con cura la superficie
- Applicare Quadrant FiniSense e lasciarlo agire per 30 sec.
- Asciugare delicatamente
- Risciacquare accuratamente