

P R E M I U M   O R A L   C A R E

-

# CAVEX ORAL PRE RINSE

-

## Productbeschrijving:

Cavex Oral Pre Rinse bevat 1,5% waterstofperoxide. De actieve zuurstof werking van de waterstofperoxide werkt als een bleekmiddel. Het vermindert de totale hoeveelheid micro-organismen en verwijdert verkleuringen op de tanden.

-

## Indicaties:

Cavex Oral Pre Rinse kan worden gebruikt als een pre procedurele spoeling voordat u begint met de eigenlijke tandheelkundige procedure (bijvoorbeeld bleken).

-

## Ingrediënten:

Aqua, erythritol, glycerol, waterstofperoxide, poloxamer, PVM/MA copolymeer, muntaroma, natriumsaccharin.

-

## Instructies:

Cavex Oral Pre-Rinse is een kant-en-klare waterige oplossing. Patiënten vanaf 18 jaar spoelen met 10 – 15 ml tenminste 30 seconden en spugen vervolgens grondig uit. Volg altijd aanwijzingen door de tandarts of tandheelkundig professional.

-

## Veiligheidswaarschuwing:

Alleen voor gebruik op aanwijzing van tandheelkundige professionals. Vermijd contact met de ogen. Spoel de ogen onmiddellijk als het product ermee in contact komt. Niet inslikken. Bevat waterstofperoxide!

-

## Inhoud:

500 ml waterige oplossing.

-

## Opslag:

Ongeopende flessen: 1 jaar wanneer gekoeld.

Na opening: 1 maand op kamertemperatuur.

YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX