

Whitening behandeling

CAVEX



SLECHTS 15 MINUTEN



CAVEX


Bite & White

PROFESSIONAL HOME WHITENING SYSTEM


READY 2 USE

Gebruiksaanwijzing


- 1 Poets het gebit grondig

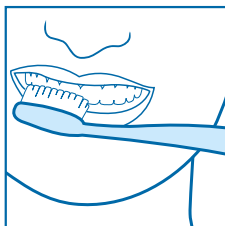

- 2 Open de folie volgens
aanwijzing op de
verpakking

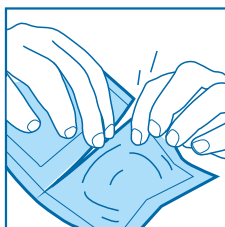


- 3 Breng de bleeklepel
aan in de mond

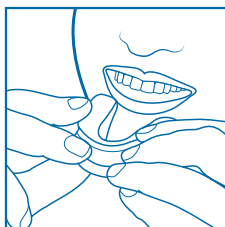

- 4 Draag de bleeklepel
gedurende vijftien
minuten



- 5 Spoel na het bleken
de mond

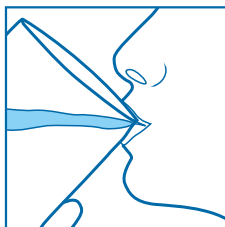

HPS Technologie

Steeds vaker wil men makkelijk en snel witte tanden. Cavex Bite&White Ready 2 Use biedt de oplossing.

Met één voorgevulde bleeklepel kan het boven- en ondergebit tegelijk worden gebleekt met een egaal wit resultaat als gevolg. Dit met een behandeling van slechts vijftien minuten, gedurende acht dagen!



Voor de behandeling



Na de behandeling

De Ready 2 Use bleeklepels zijn gevuld met een door Cavex ontwikkelde en gepatenteerde HPS (Hydrogen Peroxide Superior) gel: zeer pure waterstofperoxide van 6% in een gel met neutrale pH waarde.

Deze HPS technologie biedt ongekende voordelen:

- Het product kan buiten de koelkast bewaard worden. De gel wordt pas geactiveerd door contact met vocht.
- De bleeklepel hoeft slechts vijftien minuten in de mond te worden gedragen.
- Een volledige whitening behandeling in slechts acht dagen met aanzienlijk wittere tanden als resultaat.



CAVEX Bite&White

PROFESSIONAL HOME WHITENING SYSTEM

READY 2 USE

Cavex Bite&White Ready 2 Use is verkrijgbaar via uw depot in de volgende verpakkingen:



**Eénpersoons
verpakking**

8 voorgevulde
bleeklepels

Art. nr. BW031



Bulkverpakking

50 voorgevulde
bleeklepels

Art. nr. BW035

Voor meer informatie kijk op: www.cavex.nl/ready2use

CAVEX
www.cavex.nl

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

ZB934.05