

Empfohlen von Professionals

Cavex Bite&White ist ein Produkt von Cavex Holland, einem spezialisierten Hersteller von Zahnarztprodukten mit über 100-jähriger Erfahrung. Cavex Bite&White Professional Dental Whitening System wurde ausführlich getestet und wird von Zahnärzten und Dentalhygienikern empfohlen. Cavex Bite&White enthält 16% Carbamidperoxid, eine Substanz, die sich als Zahnaufheller bewiesen hat. Sie ist effektiv, ohne Ihre Zähne anzugreifen.

Fluorid

Cavex Bite&White enthält Natriumfluorid zur Stärkung des Zahnschmelzes sowie Kaliumnitrat, für empfindliche Zähne. Der Zusatz von Minze ergibt einen angenehmen Geschmack, falls ein wenig von der Substanz aus der Schiene gelangt. Um Mund- oder Gesundheitsprobleme auszuschließen und um Cavex Bite&White anwenden zu können, ist eine Beratung bei einem anerkannten Zahnarzt oder Dentalhygieniker für die Aufhellungsbehandlung notwendig. Alle Cavex Bite&White-Bleichmittel sind pH-neutral (pH = 6,2) und somit sicher für Ihre Zähne.

Außer dem Patientenkit gibt es auch eine Nachfüllung für etwa 10 weitere Aufhellungsanwendungen.



Mehr Informationen

Ihr Zahnarzt kann Sie über Cavex Bite&White noch näher informieren.



CAVEX BITE&WHITE

Empfindliche Zähne?

NEU! Cavex Bite&White ExSense Z a h n - C o n d i t i o n e r

Cavex Bite&White ExSense ist ein Zahn-Conditioner für daheim, der die **Zähne von ihrer Empfindlichkeit befreit** und eine erneute Empfindlichkeit verhindert. Er macht die Zahnoberfläche glatt und glänzend, so dass die Zähne weißer aussehen.

Cavex Bite&White ExSense ist auch ideal zur Anwendung nach dem Bleichen der Zähne. Der Conditioner hebt eine eventuelle Empfindlichkeit auf **und hilft den Zähnen, sich schnell zu erholen**

Fragen Sie Ihren Zahnarzt, ob Cavex Bite&White ExSense auch etwas für Sie ist.



CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
www.cavex.nl

MÖCHTEN SIE AUCH
EIN STRAHLEND
WEISSES LÄCHELN?



Zu Hause die
Zähne unter der
Betreuung Ihres
Zahnarztes
aufhellen

pH-neutral,
also sicher für
Ihre Zähne!

CAVEX
Bite&White
Professional Dental Whitening System

Hellen Sie Ihre Zähne zu Hause mit Cavex Bite&White auf. Sicher, wirksam und bequem!

Strahlend weiße Zähne

Schöne weiße Zähne sehen attraktiv aus. Man könnte Sie direkt darum beneiden! Weiße Zähne stärken außerdem Ihr Selbstvertrauen. Wissen Sie, dass man heutzutage ganz einfach die Zähne aufhellen kann? Es gibt jetzt Cavex Bite&White, ein sicheres Produkt, mit dem Sie Ihre Zähne zu Hause aufhellen können. Cavex Bite&White wirkt schnell, ist benutzerfreundlich und gibt Ihnen Ihr strahlendes Lächeln zurück!

Sicher und wirksam die Zähne aufhellen

Die meisten Menschen haben am Anfang Ihres Lebens makellos weiße Zähne. Durch Kaffee, Tee und andere Nahrungsmittel verfärben sich die Zähne nach einiger Zeit. Außerdem können die Anwendung von Medikamenten oder erbbedingte

Zahnprobleme eine Rolle spielen. Und wenn man es auch nur ungern hört, mit zunehmendem Alter verfärben sich die Zähne. Der schützende

Zahnschmelz Ihrer Zähne wird dünner, sodass Farbstoffe noch schneller eindringen können und so das darunterliegende, relativ dunkle Zahnbein sichtbar wird. Eine naheliegende Lösung ist das

Aufhellen der Zähne. Dafür wurde Cavex Bite&White entwickelt. Ein sicheres und wirksames

Zahnaufhellungsmittel. Die Behandlung findet nicht in einer Klinik oder auf dem Zahnarztstuhl statt. Sie führen sie selbst aus, wo und wann Sie möchten. Auch Ihre Zähne können so schön weiß werden wie die der anderen, um die Sie diese immer so beneideten.*

* Das Ergebnis hängt unter anderem von der Art der Verfärbung, der Intensität, der gesamten Mundhygiene und der Behandlungsdauer ab.

Lassen Sie sich von Ihrem Zahnarzt beraten

Nur ein Zahnheilkundiger darf Ihnen Cavex Bite&White verabreichen. Es empfiehlt sich, dass Sie sich vor dem Aufhellen von Ihrem Zahnarzt beraten lassen. Er kann Sie umfassend über die Möglichkeiten des Aufhellens Ihrer Zähne informieren, Ihnen nützliche Tipps geben und wichtige Vorbereitungen vornehmen. Wie beispielsweise Ihre Zähne kontrollieren, polieren und Zahnstein entfernen. Ihr Zahnarzt kann gut die heutige Farbe feststellen und ausgehend von Ihren Wünschen eine neue Farbe festlegen. Diese Farbe bildet die Grundlage für die Aufhellungsbehandlung.



Vor der Behandlung.



Nach der Behandlung ein strahlend weißes Lächeln.

Sicher ans Werk mit der passgenauen Schiene

Mit einem professionellen Abdruck Ihres Gebisses wird eine passgenaue Schiene angefertigt. Sie umschließt präzise Ihre Schneide- und Backenzähne. Die Gebisssschiene umgibt so optimal die Form Ihrer Zähne. Hierdurch kommt das Aufhellungsgel nicht oder kaum mit Ihrem Zahnfleisch in Kontakt.

Das Aufhellungsgel kann örtlich etwas Reizung oder Überempfindlichkeit verursachen. Ihr Zahnarzt sagt Ihnen genau, wie viel Gel Sie anwenden sollen.



Sie können die transparente(n) Gebisssschiene(n) und das Aufhellungsgel mit nach Hause nehmen.

Zu Hause weiter aufhellen

Da Sie sich zuerst vom Spezialisten beraten lassen und er die Vorarbeit ausführt, ist Ihr Risiko minimal und das Ergebnis maximal. Sie können den Aufhellungsvorgang zu Hause fortsetzen. Mit dem mitgelieferten Farbstreifen, auf dem die Ausgangsfarbe angezeigt wird, können Sie die erzielten Ergebnisse genau vergleichen.



Wie oft müssen Sie Ihre Zähne aufhellen?

Den Aufhellungsplan bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem Zahnarzt. Cavex Bite&White erzielt die besten Ergebnisse, wenn Sie ungefähr zehn Tage hintereinander mindestens eine Stunde pro Tag aufhellen. Sie können aufhellen, wenn es Ihnen passt!

Empfohlen von
Zahnärzten und
Dentalhygienikern



Für ein optimales Ergebnis werden zuvor Ihre Zähne kontrolliert, eventuell wird Zahnstein entfernt, und sie werden poliert.