

## Recomendado por profesionales

Cavex Bite&White es un producto de Cavex Holland, un fabricante especializado en productos dentales con más de 100 años de experiencia. El Sistema Profesional de Blanqueamiento Dental Cavex Bite&White está ampliamente probado y recomendado por odontólogos e higienistas dentales. Cavex Bite&White contiene peróxido de carbamida al 16%, un material que está probado como agente de blanqueamiento. Es eficaz sin dañar sus dientes.

## Flúor

Cavex Bite&White contiene fluoruro de sodio para el fortalecimiento del esmalte dental. También contiene nitrato de potasio que ayuda a aliviar la sensibilidad dental. Se agregó menta para un sabor agradable en caso que algo del material escape de la cubeta. Para prevenir problemas dentales o de salud y con el fin de utilizar Cavex Bite&White, es necesario consultar un odontólogo calificado o un higienista dental antes del blanqueamiento. Todos los materiales de blanqueamiento Cavex Bite&White tienen un pH neutro (pH = 6,2) y por eso son seguros para los dientes.

*demás del kit del paciente, está disponible una dosis adicional que es suficiente para aproximadamente diez blanqueamientos.*



## Más información

Su odontólogo le puede dar más información sobre Cavex Bite&White.



# CAVEX BITE&WHITE

## ¿Dientes sensibles?

### ¡NUEVO! Cavex Bite&White ExSense Acondicionador dental

Cavex Bite&White ExSense es un acondicionador dental para uso doméstico que **elimina la sensibilidad de los dientes** y evita una nueva sensibilidad. Hace la superficie de los dientes lisa y brillante, dándoles un aspecto más blanco.

Cavex Bite&White ExSense también es ideal para uso después de blanquear los dientes. El acondicionador elimina una posible sensibilidad y **ayuda a recuperar rápidamente los dientes.**

Pregunte a su dentista si Cavex Bite&White ExSense sería una opción para usted.



CAVEX  
Bite&White  
Professional Dental Whitening System

Cavex Holland BV  
Fustweg 5  
2031 CJ Haarlem  
The Netherlands  
+31 (0)23 530 77 00  
dental@cavex.nl  
www.cavex.nl

# LE GUSTARÍA UNA SONRISA BLANCA Y BRILLANTE?

¡Solo ha de  
abrir el envase y  
empezar con el  
blanqueamiento!  
¡No hay forma  
más fácil!

pH neutro  
y por eso  
seguro para  
los dientes!



CAVEX  
Bite&White  
Professional Dental Whitening System

# Blanquee sus dientes en casa con Cavex Bite&White. Seguro, efectivo y fácil!

## Dientes blancos y brillantes

Unos hermosos dientes blancos se ven atractivos. Algo que provoca celos! Además los dientes blancos le dan más confianza. Sabía usted que ahora es muy fácil blanquear sus dientes? Cavex Bite & White es un producto nuevo y seguro para el blanqueamiento de sus dientes en casa. Cavex Bite & White trabaja rápido, es fácil de usar y lo deja sonriendo con brillo otra vez!

## Blanqueamiento de dientes de forma segura y eficaz

La mayoría de la gente comienza la vida con dientes blancos e imaculados. El café, té y otras comidas y bebidas alteran el color de los dientes con el tiempo. Además, el uso de

medicinas ó problemas hereditarios de los dientes pueden jugar un papel. Envejecer también influye en el color de sus dientes. La capa protectora del esmalte en sus dientes se va haciendo más delgada, permitiendo que agentes colorantes penetren aún más rápido mediante lo cual la capa subyacente de dentina relativamente más oscura se hace más visible.

Una solución obvia es el blanqueamiento de los dientes. Cavex Bite & White ha sido desarrollado para este fin. Un agente de blanqueamiento seguro y efectivo, el tratamiento no se hace en una clínica o en un sillón dental. Lo lleva a cabo usted mismo, donde y cuando usted escoja.\*

\*El resultado depende entre otras cosas, de la naturaleza de la decoloración, la intensidad, la higiene oral en general y la duración del tratamiento.

## Consulte a su odontólogo

Cavex Bite & White está disponible únicamente a través de un odontólogo. Se recomienda ponerse en contacto con su odontólogo antes del blanqueamiento. Su odontólogo le puede aconsejar sobre las posibilidades de blanqueamiento para sus dientes, ofrecerle un consejo útil y realizar un trabajo preparatorio importante como un chequeo, pulir sus dientes y eliminar el sarro. Su odontólogo puede establecer el color correcto de sus dientes y, de acuerdo a sus requerimientos, determinar un nuevo color. Este color será la base para el programa de blanqueamiento.




Antes del tratamiento.



Después del tratamiento, una sonrisa blanca y brillante.

## Blanqueamiento de dientes con una cubeta personalizada

Una impresión de sus dientes hecha profesionalmente se utiliza para hacer un molde que se ajusta a sus dientes perfectamente. El molde se acomoda perfectamente a la forma de sus dientes y minimiza el contacto del gel blanqueador con sus encías. El gel de blanqueamiento puede ocasionar alguna irritación o sensibilidad local. Su odontólogo le indicará exactamente cuánto gel debe usar.

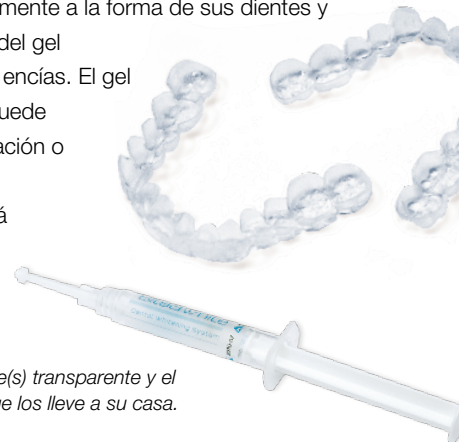

Se le entregará un molde(s) transparente y el gel blanqueador para que los lleve a su casa.

## Continuar el blanqueamiento en casa

Consultando primero un especialista y permitiéndole hacer el trabajo de preparación inicial usted se asegurará de correr el mínimo de riesgos y obtener el máximo de resultados. Usted puede continuar el blanqueamiento en casa. Usted puede comparar el resultado final con el color de la tira que le suministró su odontólogo la cual muestra el color inicial de sus dientes.



## Con qué frecuencia debe blanquear sus dientes?

La rutina de blanqueamiento se determina en consulta con su odontólogo. Usted obtendrá los mejores resultados con Cavex Bite & White si hace el blanqueamiento por lo menos una hora al día durante aproximadamente diez días consecutivos. Puede hacer el blanqueamiento durante el día, o cuando más le convenga!

Recomendado por odontólogos e higienistas dentales



Para óptimos resultados, sus dientes serán examinados primero para remover cualquier sarro y luego serán pulidos.