

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX GREENCLEAN

-
De slimme oplossing voor het verwijderen
van alginat- en gipsresten.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY

CAVEX

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

CAVEX GREENCLEAN

Wie kan een betere alginaatoplosser maken, dan de makers van 'The Best Alginates in the World'? Cavex GreenClean is het bewijs. Door de speciale formule zijn afdruklepels, spatels en instrumenten snel en gemakkelijk weer schoon.

Het geheim van Cavex GreenClean

Het verwijderen van alginaat of gips uit afdruklepels en instrumenten kan een vervelende klus zijn. Krabben of schuren kost niet alleen veel tijd, maar kan ook blijvende schade aan afdruklepels en instrumenten veroorzaken. Met Cavex GreenClean behoort dit tot het verleden. De formule is speciaal ontwikkeld om de organische matrix van het alginaat of gips af te breken en resten volledig op te lossen.

Toepassing

Voeg twee schepjes Cavex GreenClean toe aan een halve liter lauw water. Verwijder eventuele losse resten en dompel de afdruklepels en instrumenten gedurende 15-30 minuten onder. Even afspoelen en de afdruklepels en instrumenten zijn weer schoon en klaar voor gebruik. Met warm water of een ultrasoon bad gaat het proces zelfs nóg sneller. Met

Kenmerken

- **Snel, effectief en een makkelijk in gebruik**
- **Frisse citrus geur**
- **Biologisch afbreekbaar**
- **Huidvriendelijk**
- **pH neutraal**
- **Economisch: 1 kg voor 500+ schone afdruklepels**

één pot Cavex GreenClean kunnen meer dan 500 instrumenten worden gereinigd. Naast effectiviteit en gemak is dit product daarom ook nog eens erg economisch in gebruik.

pH neutraal en milieuvriendelijk

Cavex GreenClean reageert alleen met de alginaat- of gipsresten en niet met de lepels en instrumenten zelf. Deze blijven gaaf en onaangetast, net zoals de huid. De oplossing is namelijk pH-neutraal en 100% biologisch afbreekbaar. Daarom kan het na gebruik gewoon door de gootsteen worden weggespoeld. Makkelijk en verantwoord, dat is waar Cavex GreenClean voor staat.



**YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY**

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | cavex.nl

CAVEX

ZYH001.04