

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

# CAVEX GREENCLEAN

-  
La solution intelligente pour éliminer les  
résidus d'alginate et de plâtre.



YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY

CAVEX

# PREMIUM ALGINATE SYSTEM

## CAVEX GREENCLEAN

Qui d'autre que le créateur des « meilleurs alginates du monde » pourrait produire le meilleur dissolvant d'alginate ? Cavex GreenClean en est la preuve. Grâce à la formule spéciale, les porte-empreintes, spatules et instruments peuvent être nettoyés rapidement et facilement.

### Le secret de Cavex GreenClean

Retirer l'alginate ou le gypse des porte-empreintes et instruments peut être une tâche fastidieuse. Gratter ou poncer ne prend pas seulement du temps, mais peut aussi endommager les porte-empreintes et instruments de manière irréversible. Avec Cavex GreenClean, tout cela appartient au passé. La formule a été spécifiquement développée pour décomposer la matrice organique de l'alginate ou du gypse, ce qui permet de dissoudre entièrement tout résidu.

### Application

Ajoutez deux cuillers de Cavex GreenClean à un demi-litre d'eau tiède. Retirez tout résidu détaché et plongez les porte-empreintes et instruments pendant 15-30 minutes. Rincez simplement à l'eau.

### Caractéristiques

- **Rapide, efficace et facile à utiliser**
- **Parfum d'agrumes rafraîchissant**
- **Biodégradable**
- **Doux pour la peau**
- **Au pH neutre**
- **Économique, 1 kg nettoie plus de 500 porte-empreintes**

les porte-empreintes et instruments sont propres et prêts à une nouvelle utilisation. Avec de l'eau chaude ou un bain à ultrasons, le processus est encore plus rapide. Plus de 500 instruments peuvent être nettoyés avec un pot de Cavex GreenClean. Ainsi, en plus d'être efficace et pratique, ce produit est aussi très économique à l'usage.

### Au pH neutre et écologique

Cavex GreenClean réagit uniquement aux résidus d'alginate ou de gypse, mais pas aux porte-empreintes et instruments. Ces derniers ne sont pas touchés et restent intacts. Sans danger également pour la peau. La solution a un pH neutre et est 100 % biodégradable. Elle peut donc être simplement jetée dans l'évier après utilisation. Facile et responsable, voilà ce qui caractérise Cavex GreenClean.



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Pays Bas | cavex.nl

CAVEX

ZYH001F.03