

PREMIUM RESTORATIVES

# CAVEX TEMPORARY CEMENT

-  
Eugenol vrij cement voor het cementeren  
van tijdelijke kronen en bruggen.



**YOUR  
IMPRESSION  
IS OUR  
SPECIALTY**

**CAVEX**

# PREMIUM RESTORATIVES

## CAVEX TEMPORARY CEMENT

Een tijdelijk cement moet betrouwbaar en effectief zijn. Het moet ook gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen zijn, zonder residu achter te laten. Cavex ontwikkelde de ideale oplossing om aan deze behoeften te voldoen: Cavex Temporary Cement. De eigenschappen van het cement zijn perfect voor het cementeren van tijdelijke kronen en bruggen. Cavex Temporary Cement is gebruiksvriendelijk, geurloos en esthetisch.

### Perfect op elkaar afgestemde eigenschappen

Cavex Temporary Cement is speciaal ontwikkeld voor het cementeren van tijdelijke kronen en bruggen. Het zorgt ervoor dat het geprepareerde element volledig

wordt afgedicht om bacteriële infecties te helpen voorkomen. Het is eugenol vrij en reageert daarom niet met composietmaterialen.

### Toepassing

Neem twee gelijke delen uit de basis- en katalysatortube en meng ze gedurende 30 seconden met een spatel tot een homogene pasta. De pasta heeft een uithardingstijd van twee minuten in de mond, waarna overtollig cement eenvoudig kan worden verwijderd. De totale uithardingstijd van het cement is vijf minuten.

### Kenmerken

- Gebruiksvriendelijk
- Eugenol vrij
- Onderscheidende kleuren
- Perfecte afdichting
- Lage oplosbaarheid
- Korte uithardingstijd
- Gemakkelijk te verwijderen



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | cavex.nl

CAVEX

ZYC001NL.00