

HET GEHEIM VAN GEDETAILEERDE KAAKAFDRUKKEN

Ontdek de 'sandwich layering' techniek van algiinaat

Het nemen van een nauwkeurige afdruk van een onbetande kaak is essentieel voor het maken van comfortabele en goed passende protheses. De innovatieve 'sandwich layering' techniek biedt u de mogelijkheid om afdrucken te maken die net zo gedetailleerd zijn als die met siliconen. Door gebruik te maken van het vloeibare Cream algiinaat in combinatie met het stuggere CA37 algiinaat in de afdrukkel, bereikt u een perfecte balans tussen flexibiliteit en stabiliteit. Deze methode zorgt ervoor dat alle anatomische details van de kaak nauwkeurig worden vastgelegd, wat resulteert in een optimale pasvorm en een tevreden patiënt.

STAPPENPLAN

Stap 1: Voorbereiding

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon is. Spoel met water, droog het overtollige vocht.

Stap 2: Algiinaat mengen

- Meng het Cavex CA37 Normal set algiinaat zoals beschreven op de verpakking en breng dit aan in een lepel.
- Meng direct het Cavex Cream Fast set algiinaat of als meer tijd gewenst is Normal set zoals beschreven op de verpakking en breng dit aan in een syringe.



Stap 3: Algiinaat aanbrenge

Plaats de syringe met Cream algiinaat voorzichtig in de mond en spuit een gelijkmatige hoeveelheid rond het oppervlak van de kaak. Zorg dat het algiinaat goed contact maakt met de kaak.



Stap 4: Afdrukkel aanbrengen

Breng de lepel met CA37 algiinaat in de mond van de patiënt over de laag met het aangebrachte Cream algiinaat. Laat het algiinaat uitharden gedurende de voorgeschreven tijd.

Stap 5: Verwijder de afdruk

Nadat het algiinaat is uitgehard, verwijder voorzichtig de afdruk uit de mond. Controleer of alle gewenste details duidelijk zichtbaar zijn.



YOUR
IMPRESSION
IS OUR
SPECIALTY